

# Installation des drivers Medicapteurs

**Attention !!!** Cette procédure ne concerne que les plateformes achetées à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2008 et branchées sur des ports USB 1.1 ou 2.0.


## Lancement de l'installation

---


- Double cliquez alors sur l'icône




- Choisissez votre répertoire d'installation puis cliquez sur « Next » :

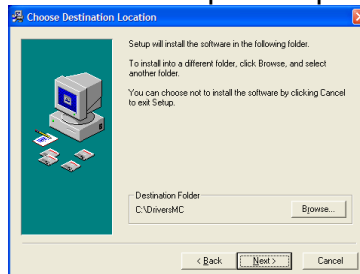


- L'écran suivant apparaît, cliquez sur « Next » :

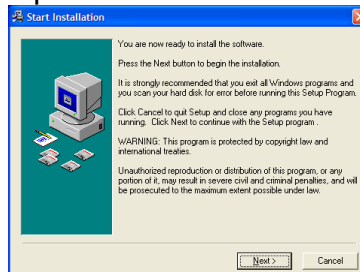

- Choisissez de la langue de l'installateur automatique :

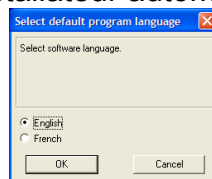


- Quand l'installation est terminée, cliquez sur « Finish » :

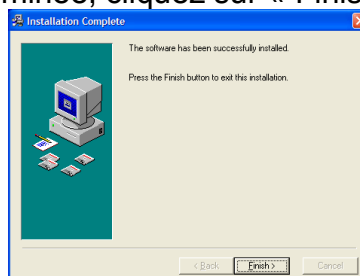

# Installation des drivers

- Double-cliquez sur l'icône du Poste de travail (« Ordinateur » sous Windows Vista, Seven ou 8) et allez chercher le répertoire « c:\ DriversMC » :

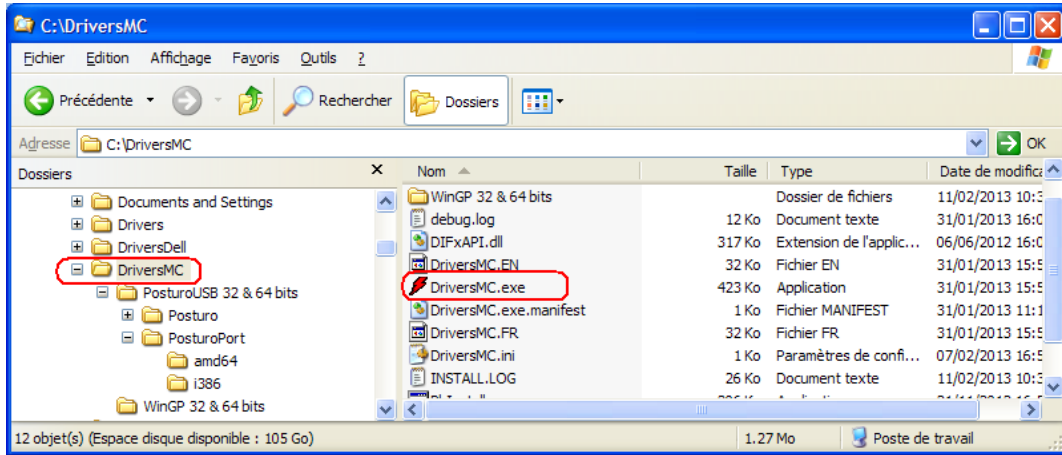


- Double-cliquez sur « DriversMC.exe », l'écran suivant apparaît :



- Cliquez sur « Installez drivers ».
- La fenêtre suivante apparaît, cochez la case « Toujours faire confiance aux logiciels provenant de Medicateurs France » puis cliquez sur « Installer » :



- Lorsque l'installation est terminée, l'écran suivant apparaît :

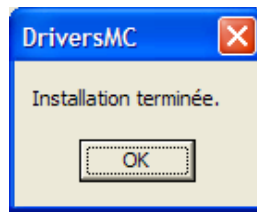

- Vous pouvez vérifier que le pilote de la plate-forme est correctement installé dans « Démarrer / Panneau de configuration / Système / Matériel / Gestionnaire de périphériques / Contrôleur de bus USB ». La ligne « Podometer MC board » doit être visible.

