


ATTENTION !!! Cette procédure ne concerne que les plateformes achetées à partir du 1er janvier 2008.


1. Installation des drivers

1. Fermez toutes les applications et **déconnectez la plateforme**.


2. Double-cliquez sur l'icône

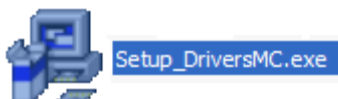


3. Choisissez votre répertoire d'installation puis cliquez sur « Next » :

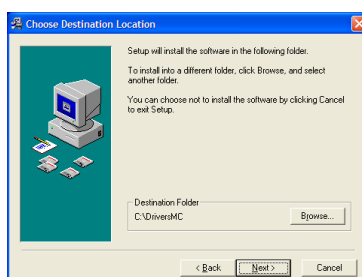

4. L'écran suivant apparaît, cliquez sur « Next » :

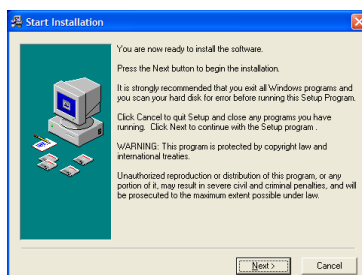


5. Choisissez de la langue de l'installateur automatique :

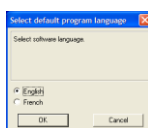

6. **Si les drivers n'ont jamais été installés sur le PC passez directement au paragraphe 7.**


Si les drivers sont déjà installés sur le PC, l'écran suivant apparaît. Cliquez sur « OK », votre ordinateur va redémarrer. Passez ensuite au chapitre « 2. Mise à jour des drivers ».

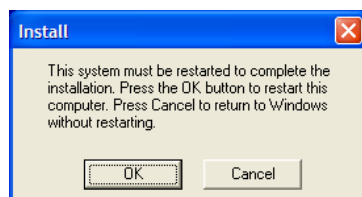


7. **Si les drivers n'ont jamais été installés sur le PC**, pendant l'installation, suivant votre OS, la fenêtre suivante peut apparaître. Cochez la case « **Toujours faire confiance aux logiciels provenant de Medicapeurs France** » puis cliquez sur « **Installer** » :



8. Pendant l'installation, un message d'avertissement de votre anti-virus peut apparaître. Cliquez sur « **Ok** » afin que l'installation ne s'interrompe pas.
9. Quand l'installation est terminée, cliquez sur « **Finish** » :

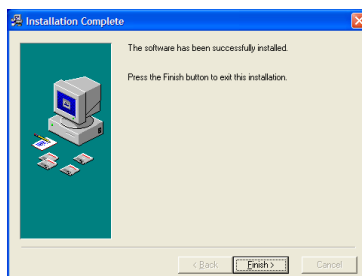


10. L'écran suivant apparaît. Cliquez sur « **OK** », votre ordinateur va redémarrer. Passez ensuite directement au chapitre « **3. Connexion de la plate-forme** ».

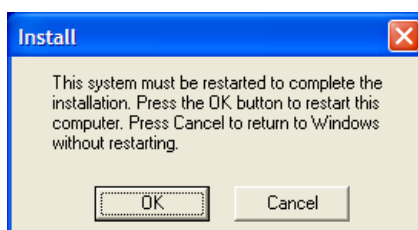


2. Mise à jour des drivers


1. Fermez toutes les applications et **ne connectez pas la plateforme**.
2. Double-cliquez sur l'icône « Ordinateur » (« Poste de travail » sous Windows XP) et allez chercher le répertoire « c:\ DriversMC » :

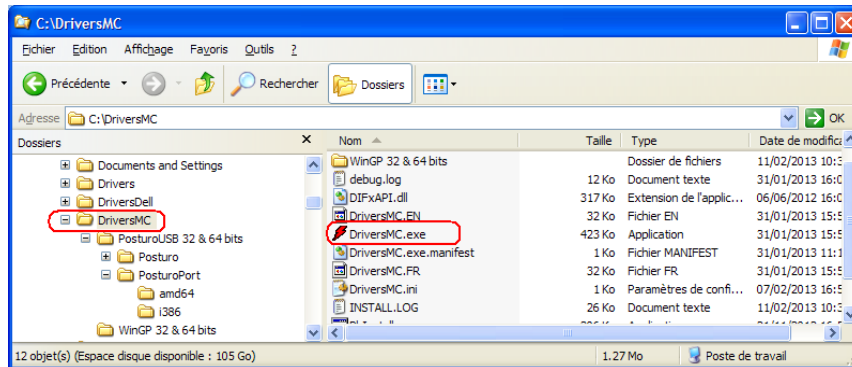

3. Double-cliquez sur « DriversMC.exe », l'écran suivant apparaît. Vérifiez, en haut de l'écran, que les drivers V2 sont bien installés sur votre PC :

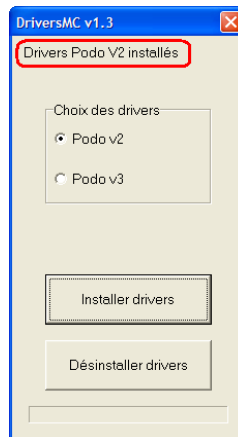

4. Cochez « Podo v2 » dans « Choix des drivers » puis cliquez sur « Désinstaller drivers ». Redémarrez le PC lorsque la fenêtre suivante apparaît :

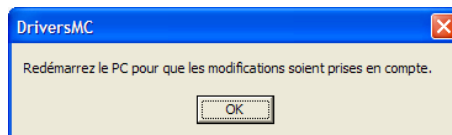


5. Quand l'ordinateur a redémarré, relancez « DriversMC.exe ». Cochez « Podo v3 » dans « Choix des drivers » puis cliquez sur « Installer drivers ».

6. Pendant l'installation, suivant votre OS, la fenêtre suivante peut apparaître. Cochez la case « Toujours faire confiance aux logiciels provenant de Medicapteurs France » puis cliquez sur « Installer » :




7. Pendant l'installation, un message d'avertissement de votre anti-virus peut apparaître. Cliquez sur « Ok » afin que l'installation ne s'interrompe pas.
8. Redémarrez le PC lorsque la fenêtre suivante apparaît, puis passez au chapitre « 3. Connexion de la plate-forme ».

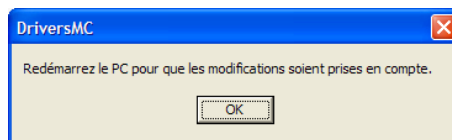


3. Connexion de la plate-forme

1. Quand l'ordinateur a redémarré, **connectez votre plateforme**. Si vous installez **sous Windows XP** veuillez suivre la procédure décrite ci-dessous, **sinon passez directement au paragraphe 2**.


a. Au 1^{er} branchement de la plate-forme sur un port USB, l'assistant Windows s'ouvre. Cochez « Oui, cette fois seulement », puis cliquez sur « Suivant » :

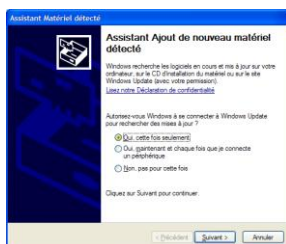


b. Cochez « Installer le logiciel automatiquement (recommandé) », puis cliquez sur « Suivant » :

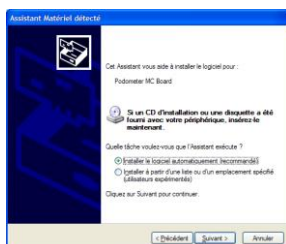


c. Quand la fenêtre suivante apparaît cliquez sur « Continuer » :

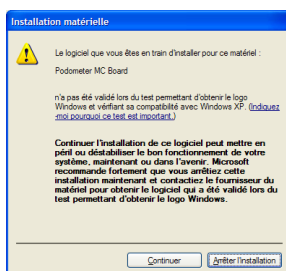

d. Cliquez sur « Terminer » :

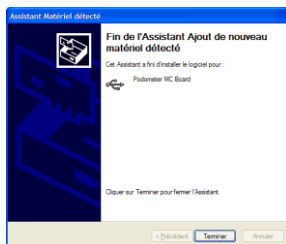

2. Une fois l'installation terminée, Windows affiche le message suivant en bas à droite de votre écran :

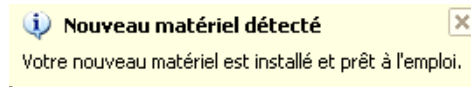

3. Vous pouvez vérifier que le pilote de la plate-forme est correctement installé dans « Démarrer / Panneau de configuration / Système / Matériel / Gestionnaire de périphériques / Contrôleur de bus USB ». La ligne « Podometer MC board » doit être visible.

