

# Mise en réseau de PARADOX

Medicapteurs  
07/09/05 – 24/04/12  
Maj : 17/02/15

## Généralités

Les logiciels Medicapteurs ne sont pas des logiciels réseau fonctionnant en réseau. La base Paradox peut être partagée, modifiée lue sur plusieurs postes.

### Remarque :

*La base de données peut être hébergée et partagée depuis un NAS. Le NAS se comportera comme le serveur.*

## Terminologie :


Poste serveur : PC qui héberge la base de données ; peut être aussi utilisé comme PC de travail (client).

Poste client : PC qui utilise une base délocalisée.

## Important :

A chaque fois que vous devez lancer l'administrateur BDE, il faut l'ouvrir depuis l'explorateur de fichiers (et non depuis le panneau de configuration) :

C:\ Programmes\ Common Files\ Borland Shared\ BDE, puis clic-droit sur **bdeadmin.exe** et « Exécuter en tant qu'administrateur ».

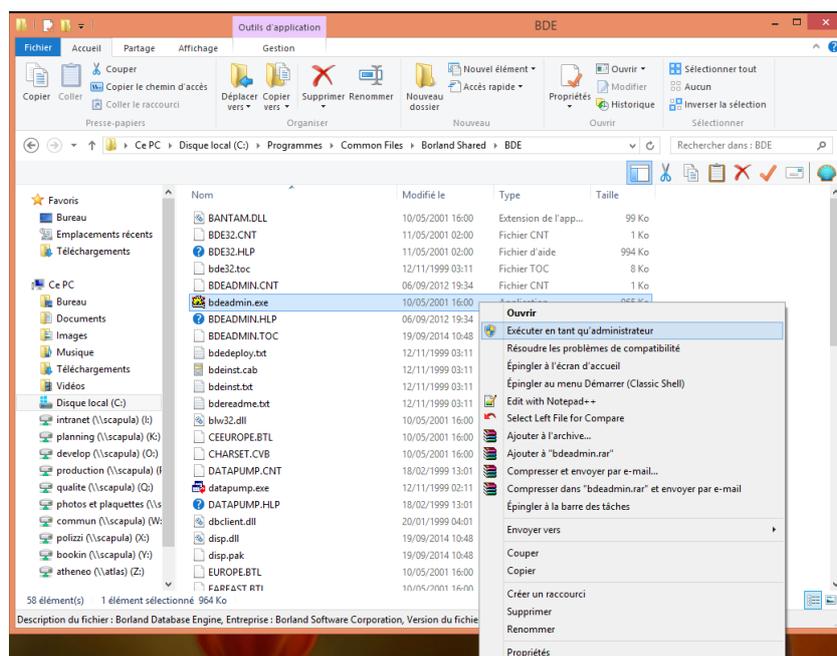

## Etape 1

Sur le poste serveur :


- 1- Installer le logiciel.
- 2- Partager le répertoire de la base en lecture et écriture (c:\win-pod\data).
- 3- Créer un répertoire c:\Net\_Dir et le partager en lecture et écriture.

## Etape 2

Sur chaque poste client :

- 1- Installer le logiciel.
- 2- Dans l'administrateur BDE, écrire dans le paramètre PATH de l'alias TWINPEL le chemin de la base partagée sur le poste serveur.

**Important** : N'utilisez pas la lettre du lecteur mais le nom complet du poste serveur (ici TABLETTE).

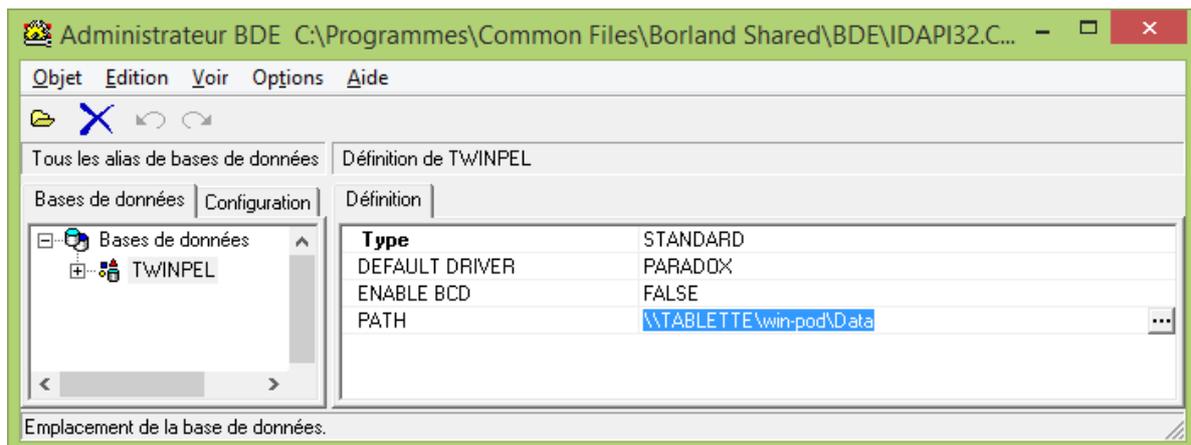

## Etape 3

Partage du fichier PDOXUSRS.NET


Sur chaque poste client et sur le serveur (si celui-ci est utilisé avec le logiciel), dans l'administrateur BDE, écrire dans le paramètre NET DIR le chemin du répertoire Net\_Dir créé sur le poste serveur.

**Important** : Il faut que ce paramètre soit IDENTIQUE sur chaque poste, donc utiliser le nom complet du serveur (ici Tablette) MEME pour le serveur.

Le Net Dir ne peut pas se trouver à la racine d'un disque mais dans un répertoire du disque.


Sur les postes clients, vérifier qu'il n'existe aucun fichier PDOXUSRS.NET et sur le serveur que si ce fichier existe, il n'est que dans c:\Net\_Dir.

Supprimer tous les PDOXUSRS.NET en trop (vieilles installations).

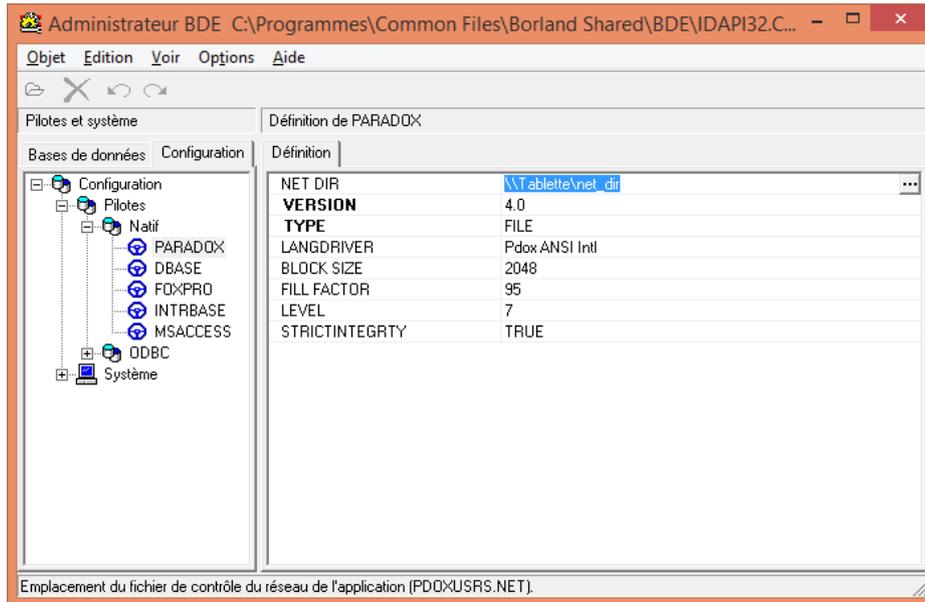

## Etape 4

Si un des PC (client ou serveur) est en 64 bits, mettre dans les options d'INIT le paramètre LOCAL SHARE à TRUE sur **tous** les PC (sur chaque poste client et sur le serveur).

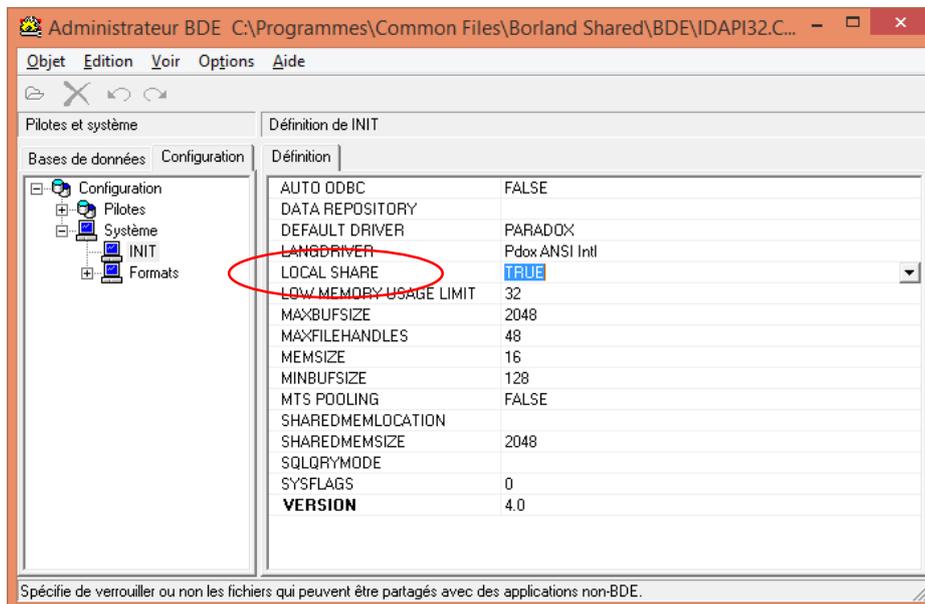

## Etape 5

Sur chaque poste client contrôler dans le fichier c:\win-pod\winpod.ini.

[Main]

**CreateAlias=0**

Si les PC sont utilisés avec un compte Utilisateur, lancer une fois le logiciel depuis un des PC avec un compte Administrateur afin de créer le fichier Pdoxusrs.net dans le répertoire Net\_Dir.