


Manuel d'utilisation logiciel

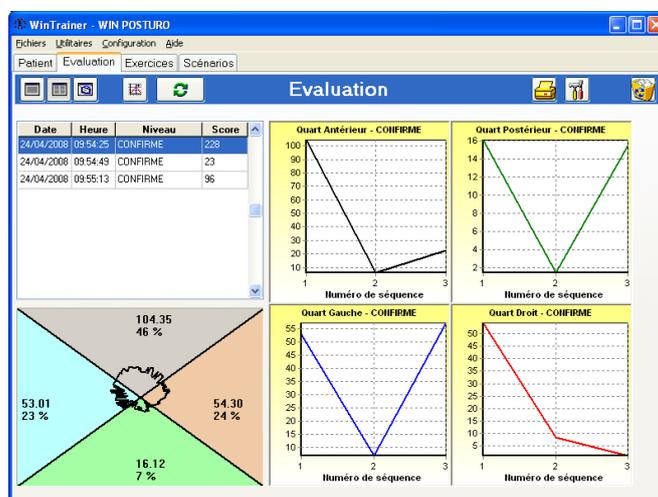

WinTrainer Nv


medicapeurs
PODLOGIE, POSTUROLOGIE ET RÉÉDUCATION

"Les Espaces de Balma"
18 av. Charles de Gaulle – Bât.34
31130 BALMA
Tél : 33 (0) 562 571 571
www.medicapeurs.fr

Avant-Propos

Vous avez fait confiance à la société MEDICAPTEURS et nous vous en remercions.

Le logiciel "WINTRAINER NV" a été conçu pour être utilisé avec le plus de facilité possible par des utilisateurs n'étant pas des experts en informatique.

Néanmoins, la convivialité du logiciel ne vous dispense pas de lire attentivement ce manuel qui vous guidera pas à pas dans l'utilisation de "WINTRAINER NV", et vous fera gagner beaucoup de temps.

En complément à ce manuel, sur votre clé USB "WINTRAINER NV", vous trouverez :

- Le **Manuel d'installation** de la plate-forme et du logiciel "WINTRAINER NV".

Bonne lecture et bienvenue dans le club privilégié des utilisateurs de la plate-forme WIN-POSTURO.

Sommaire

SOMMAIRE.....	4
GARANTIE	5
AVERTISSEMENT	6
LANCEMENT DE WINTRAINER NV	7
QUITTER WINTRAINER NV	7
ENVIRONNEMENT DE WINTRAINER NV	8
LA BARRE DE MENU	9
MENU "FICHIERS"	9
MENU "UTILITAIRES"	10
MENU "CONFIGURATION"	11
L'ONGLET "PATIENT"	16
LA BARRE D'OUTILS	15
CREATION D'UN NOUVEAU PATIENT	16
RAPPEL D'UN PATIENT EXISTANT	16
MODIFICATION D'UNE FICHE PATIENT EXISTANTE.....	16
L'ONGLET "EVALUATION"	17
LA BARRE D'OUTILS	18
PARAMETRAGE DES NIVEAUX.....	18
LES DIFFERENTES VISUALISATIONS	19
L'ONGLET "EXERCICES"	21
LA BARRE D'OUTILS	22
CREATION D'UNE MESURE (ACQUISITION)	22
PING PONG	23
POURSUITE DE BALLEs	25
APPARITION DE BALLEs	27
STABILISATION.....	29
INITIATION A LA MARCHÉ.....	31
PACMAN	33
L'ONGLET "SCENARIOS"	35
IMPRESSION	36
EXPORTATION DE DONNEES	36
SAUVEGARDE DU FICHER PATIENT	37
SAUVEGARDER LE FICHER PATIENT	37
RECUPERER UN FICHER PATIENT SAUVEGARDE	37

Garantie

Ce matériel est garanti de tout défaut de fabrication pendant 1 an à dater du jour de livraison.

Pendant cette période, toute réparation ou remplacement de pièces défectueuses sera effectué par la société MEDICAPTEURS, à condition qu'aucune erreur d'utilisation ou d'installation n'ait été constatée.

La totalité des frais de réexpédition en nos locaux est à la charge du client.

Dans le cas où le dispositif devrait être réexpédié à MEDICAPTEURS pour réparation ou maintenance, précisez, en plus des coordonnées d'origine, le numéro de série de l'appareil et la description de l'anomalie constatée.

Utilisez le carton et l'emballage d'origine. Dans le cas où celui-ci ne serait plus disponible, veuillez vous adresser à notre service expédition qui vous renseignera sur le type d'emballage à utiliser.

Limites de la garantie

La garantie n'est pas applicable aux détériorations causées sur le matériel par une mauvaise utilisation ou maintenance.

MEDICAPTEURS n'accorde aucune garantie, explicite ou implicite, sur le présent manuel et le logiciel qui y est décrit.

Le client reconnaît avoir examiné les possibilités du logiciel et les normes d'usage avant la commande. Le logiciel est vendu avec ses éventuels défauts et imperfections.

L'utilisateur s'interdit formellement de vendre le logiciel, de le prêter, de le donner en démonstration, de le copier, de l'imiter ou de le modifier.

L'utilisateur n'a aucune propriété sur le logiciel. En aucun cas, la société ne pourra être tenue pour responsable des dommages directs ou indirects causés par une quelconque utilisation du logiciel ou du matériel, de même qu'elle ne pourra être tenue d'apporter des modifications aux logiciels selon les besoins spécifiques de l'utilisateur.

La société vend une licence d'utilisation du logiciel, incessible et non exclusive. En cas de cession de la licence faite sans l'accord préalable et écrit de la société, le cédant et le cessionnaire seront solidairement tenus envers la société, au paiement d'une indemnité au moins égale à 20 fois le prix du logiciel, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts. Le logiciel voyage aux risques du client et à ses frais.

La société se réserve le droit de modifier après livraison, tout ou partie du logiciel ou du présent manuel sans avertissement préalable.

AVERTISSEMENT

Votre logiciel "WINTRAINER NV" intègre une base de données (**fichier patient**) qui contient tous les paramètres liés aux patients ainsi que toutes les mesures qui y sont rattachées.

Afin de ne pas perdre le travail effectué avec notre logiciel, il est **indispensable** de sauvegarder fréquemment le fichier patient du logiciel "WINTRAINER NV", en effet, un problème technique sur l'ordinateur ou le disque dur peut endommager, voire détruire toutes vos données.

Nous conseillons au minimum **une sauvegarde hebdomadaire** sur un support externe, disque dur amovible, CD à graver, etc. (voir page 37).

Lancement de WINTRAINER NV



- ✓ Lancez le logiciel "WINTRAINER NV", en double-cliquant sur l'icône 
- ✓ Une fenêtre apparaît demandant les droits d'accès de l'utilisateur :
Remarque : cette option sécurité est désormais obligatoire dans les logiciels traitants des données patients confidentielles.


A screenshot of a Windows dialog box titled "Droits d'accès". It contains two text input fields: "Utilisateur" with the text "ADMIN" entered, and "Mot de passe" which is empty. At the bottom right, there are two buttons: "Ok" with a green checkmark icon and "Annuler" with a red X icon.

Le logiciel est livré par défaut avec l'utilisateur : "ADMIN" qui n'a pas besoin de mot de passe. Pour créer votre nom d'utilisateur avec mot de passe voir page 14.

- ✓ Cliquez sur .

Quitter WINTRAINER NV

Par le bouton "Fermer" :

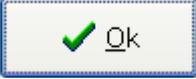- ✓ Cliquez sur le bouton  dans l'angle supérieur droit de la fenêtre.
- ✓ Confirmez en cliquant sur .

Par le menu "Fichiers" :

- ✓ Cliquez sur le menu "Fichiers".
- ✓ Cliquez sur "Quitter".
- ✓ Confirmez en cliquant sur .

Environnement de WINTRAINER NV


Barre de menu



Fichiers Utilitaires Configuration Aide

Elle contient les menus **Fichiers – Utilitaires - Configuration - Aide**.

Barre d'onglets

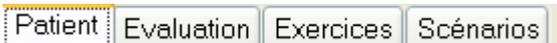

Patient Evaluation Exercices Scénarios

Elle permet d'accéder aux différentes options du logiciel.

Barre d'outils



Elle contient les boutons qui permettent d'exécuter rapidement des commandes du logiciel.


Plusieurs barres d'outils sont disponibles en fonction des écrans affichés.

La barre de menu

Menu "Fichiers"


Menu Professions : ce menu permet de générer ou de modifier une liste pré-établie de professions accessible lors du renseignement de la fiche patient.

Ajout d'un élément à la liste

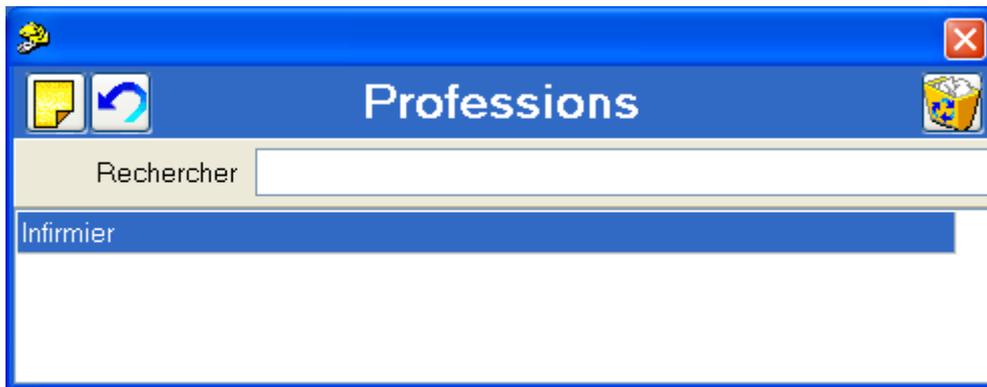

- ✓ Cliquez sur .
- ✓ Saisir le texte au clavier (Mettre une majuscule en début de ligne !).
- ✓ Cliquez sur .

Suppression d'un élément de la liste

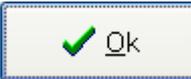- ✓ Cliquez sur la ligne à supprimer.
- ✓ Cliquez sur .
- ✓ Confirmez en cliquant sur .


La barre de menu

Menu "Utilitaires"

Publipostage

La fonction "**Publipostage**" vous permet de réaliser un listing sur votre fichier patient.

- ✓ Cliquez sur "**Publipostage**" et la fenêtre ci-dessous apparaîtra :

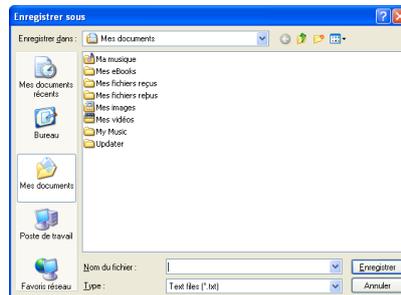

- ✓ Enregistrez les données en fichier texte.

Pour ouvrir la liste ainsi déterminée sous forme de tableau :

- ✓ Ouvrez un tableur (Excel par exemple).
- ✓ Chargez le fichier que vous venez de réaliser en format ".txt".
Le tableur créera automatiquement les lignes et colonnes de votre publipostage.


La barre de menu

Menu "Configuration"

Paramètres

La fenêtre Paramètres comprend plusieurs onglets :

- L'onglet "**Générales**" vous permet de modifier les paramètres suivants :

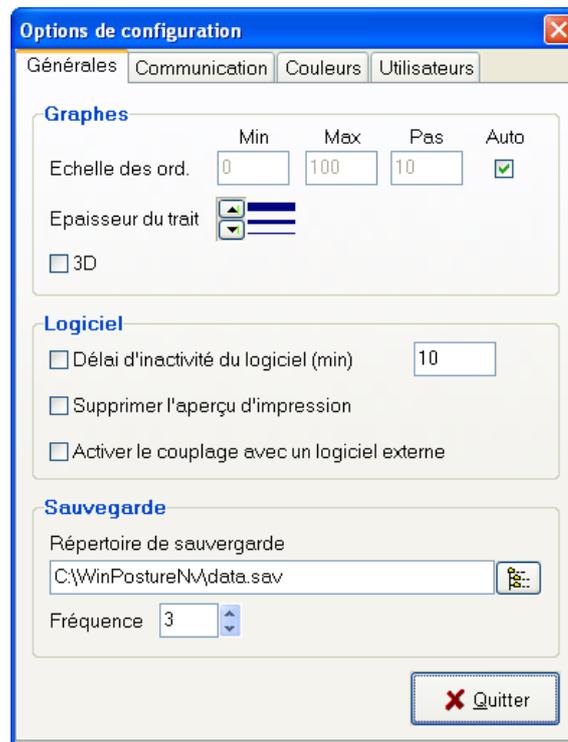

- **Graphes** : permet de paramétrer la visualisation des courbes du logiciel.
- **Délai d'inactivité du logiciel** : réglage du délai avant la mise en veille du logiciel. La saisie du mot de passe sera nécessaire pour accéder à nouveau au logiciel.
- **Avoir l'aperçu d'impression** : activé ou non.
- **Activer le couplage avec un logiciel externe** : permet d'échanger les informations patient et mesure entre "WINTRAINER NV" et d'autres logiciels (exemple : RM informatique).
- **Sauvegarde** : permet de définir le répertoire de sauvegarde du fichier patient et la fréquence des sauvegardes (nombre de fois où l'utilisateur a fermé le logiciel).

La barre de menu

Menu "Configuration"



Paramètres

- L'onglet "Communication"



Vérifiez que la plate-forme est bien connectée au PC et alimentée.

- **Scan Com** : permet d'enregistrer le paramètre de connexion PC/Plate-forme.
Si le message d'erreur "**Plate forme posturo absente ou défectueuse**" apparaît à l'ouverture du logiciel, cliquez sur "**Scan Com**" pour établir la connexion PC /Plate-forme.

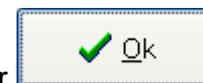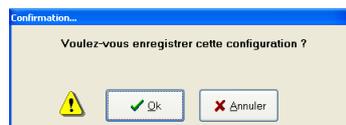

Puis enregistrez votre configuration en cliquant sur

REMARQUE IMPORTANTE : Vous devrez relancer "Scan Com" à chaque fois qu'un changement interviendra dans la configuration de branchement de votre plate-forme sur le PC.


- **Coefficients de calibration** : valeur d'étalonnage des capteurs après initialisation de la plate-forme.
Si vous récupérez votre plate-forme après un aller-retour dans nos locaux pour dépannage, vous devez réinitialiser les coefficients de calibration en cliquant sur "**Lecture Coeff.**"
- **Test à vide** : permet de tester la plate-forme à vide (réservé à la maintenance).

La barre de menu

Menu "Configuration"


Paramètres

- L'onglet "**Couleurs**" permet de redéfinir la quasi totalité des couleurs utilisées dans votre logiciel ainsi bien à l'écran qu'à l'impression :

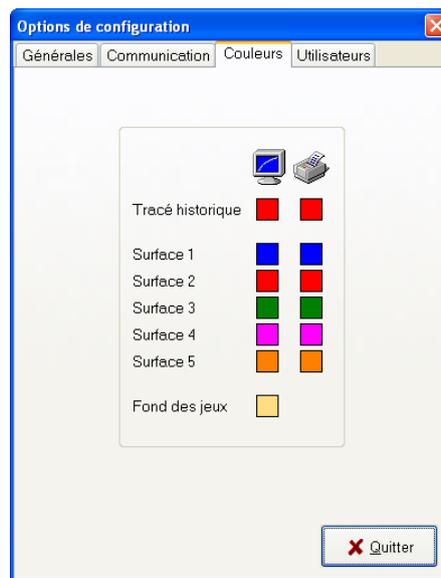

Pour modifier une couleur, cliquez sur la couleur à modifier. Une palette de couleurs apparaît à l'écran. Cliquez sur la couleur désirée puis validez.

- L'onglet "**Utilisateurs**" permet le filtrage des fichiers patients en fonction des utilisateurs (cabinet de groupe, assistant...) : cochez la case si vous souhaitez voir apparaître uniquement les patients générés par l'utilisateur sélectionné.

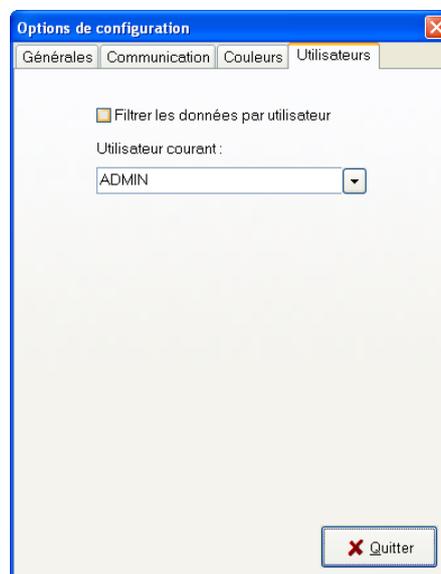

La barre de menu

Menu "Configuration"

Cabinet Médical

Vous permet de saisir les coordonnées et le logo de votre cabinet, qui apparaîtront en en-tête de toutes vos impressions.

Cette opération doit être réalisée lors de la première utilisation de votre logiciel.



The screenshot shows a dialog box titled "Identification du cabinet médical" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and options:

Nom	MEDICAPTEURS
Adresse	"Les Espaces de Balma" 18 av. Charles de Gaulle 31138 BALMA Cedex
Tél / Fax	0562.571.571 / 0562.577.468
E-mail	info@medicapeurs.fr
Site Web	www.medicapeurs.fr

On the right side of the dialog, there is a logo selection area. It features a blue Star of Life (Rod of Asclepius) logo. Below the logo are two buttons: "Changer Logo" (with a folder icon) and "Aucun Logo" (with a red prohibition sign icon).

Droits d'accès

Seul l'administrateur du logiciel a accès à cette option. Elle permet d'initialiser le (ou les) nom(s) du (des) praticien(s) utilisant la plate-forme et de lui (leur) attribuer un mot de passe.

Plusieurs utilisateurs peuvent ainsi travailler sur la même plate-forme (cabinet de groupe). Ce paramètre doit être sélectionné à la première utilisation du logiciel ou lors de chaque changement d'utilisateur.

Langue

Cliquez sur la langue souhaitée, le logiciel est traduit automatiquement.

L'onglet "Patient"

WinTrainer - WIN POSTURO

Fichiers Utilitaires Configuration Aide

Patient Evaluation Exercices Scénarios

Patient

Patient

N° Dossier Créé le Par

Nom Prénom

Sexe Né(e) le Lieu de nais.

Pointure Taille cm Poids kg Profession

Limites de stabilité

Avant Arrière Gauche Droite

Adresse

Code postal Ville

Téléphone

Privé

Professionnel

Notes du patient

La barre d'outils

-  Nouveau : Création d'un nouveau patient.
-  Recherche : Accès au fichier patient, rappel d'un patient existant.
-  Modifier : Permet d'effectuer une modification sur une fiche patient existante.
-  Validation.
-  Annulation.
-  Limites de stabilité (utilisées uniquement avec l'option WinTrainer 3D – pour plus de renseignements contactez-nous – voir manuel correspondant).
-  Impression de la fiche patient.
-  Impression de l'ensemble des fiches patient.
-  Suppression d'un patient et de toutes ses mesures associées.


L'onglet "Patient"

Création d'un nouveau patient

- ✓ Cliquez sur .
- ✓ Saisir les différentes rubriques.
Les **rubriques obligatoires** sont en bleu : Nom, Prénom, Date de naissance, Pointure et Taille.
- ✓ Utilisez les listes prédéfinies  (voir menu "Fichiers") pour les champs "Sexe" et "Professions".
- ✓ Lorsque la fiche patient est saisie, cliquez sur .

Rappel d'un patient existant

- ✓ Cliquez sur  qui vous donne accès à votre fichier patient :

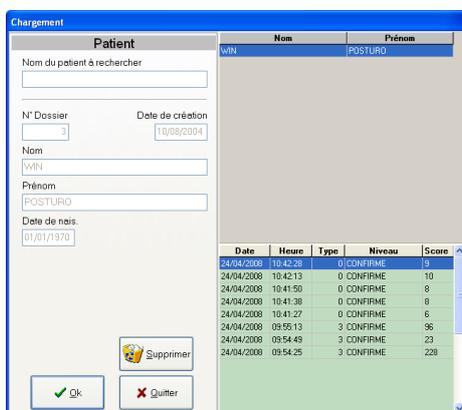

Date	Heure	Type	Niveau	Score
24/04/2008	10:42:28	0 CONFIRME	9	
24/04/2008	10:42:13	0 CONFIRME	10	
24/04/2008	10:41:50	0 CONFIRME	8	
24/04/2008	10:41:38	0 CONFIRME	8	
24/04/2008	10:41:27	0 CONFIRME	6	
24/04/2008	09:55:13	3 CONFIRME	96	
24/04/2008	09:54:49	3 CONFIRME	23	
24/04/2008	09:54:25	3 CONFIRME	228	

- ✓ Saisir les premières lettres du nom dans le champ "Nom du patient à rechercher".
- ✓ Cliquez sur  **Ok** ou double-cliquez directement sur le nom du patient pour charger la fiche.


Modification d'une fiche patient existante

- ✓ Cliquez sur .
- ✓ Modifiez les champs désirés.
- ✓ Cliquez sur  pour valider les modifications.

L'onglet "Evaluation"

L'onglet "Evaluation" permet de définir "l'identité" posturale d'un patient à la première consultation et de déterminer ses carences.

Le praticien peut ainsi visualiser l'amélioration de l'équilibre pendant toute la durée du traitement.

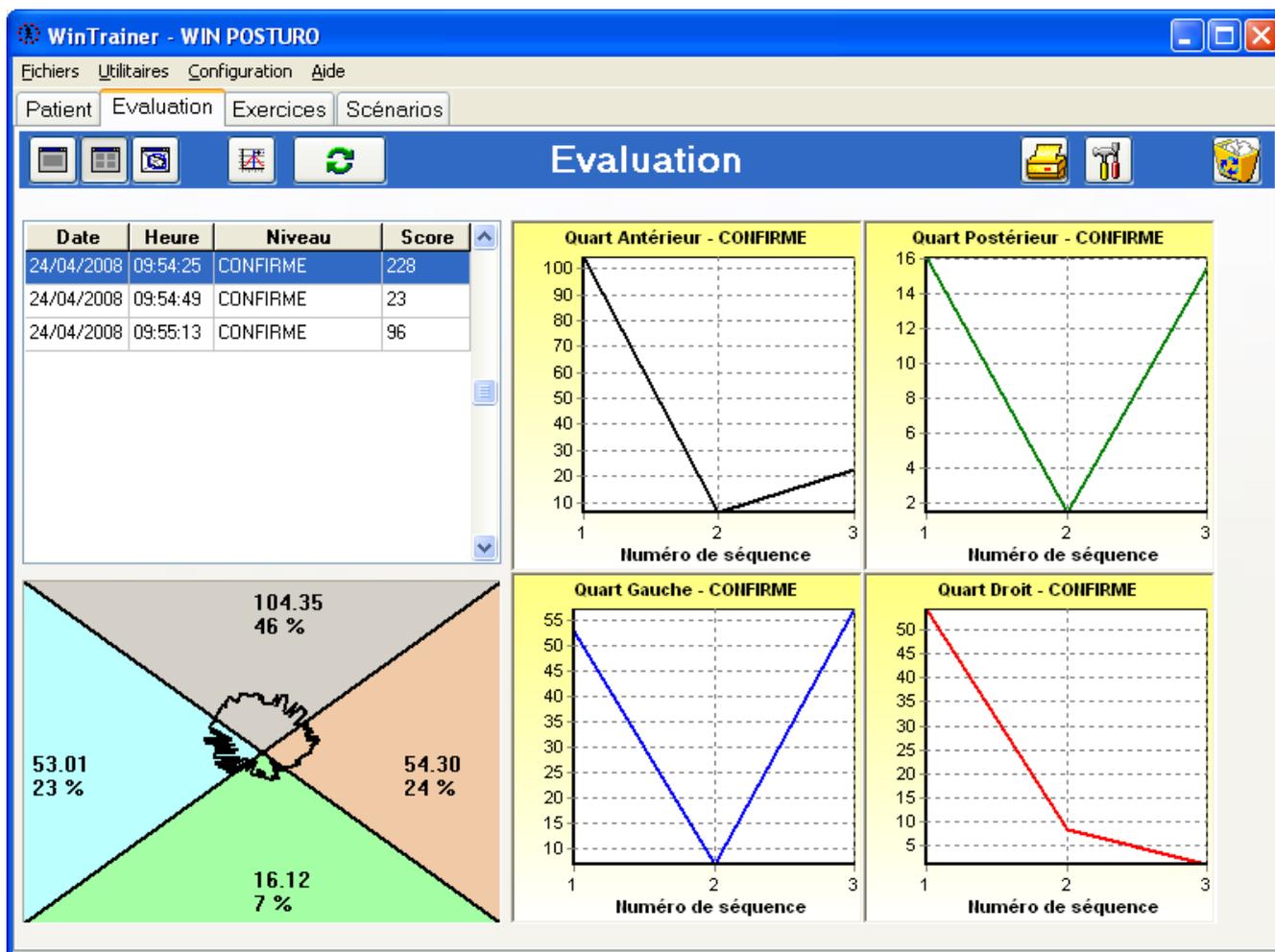

L'onglet "Evaluation"

La barre d'outils



Visualisation de la courbe d'évaluation posturale globale.



Visualisation des courbes d'évaluation posturale par cadran.



Visualisation de la représentation de la surface d'évaluation.



Accès au paramétrage des niveaux de difficulté.



Lancement de l'évaluation.



Impression.



Calibration de la plate-forme.




Suppression de l'exercice sélectionné.

Paramétrage des niveaux

Vous pouvez personnaliser chaque niveau des exercices d'évaluation vous-même en modifiant la durée de l'exercice ainsi que les paramètres de visualisation.

- ✓ Cliquez sur  pour ouvrir la fenêtre de paramétrage :

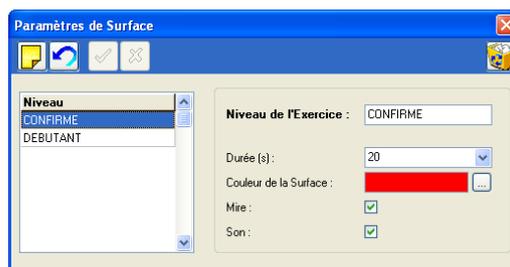

- ✓ Pour créer un nouveau niveau, cliquez sur  sinon cliquez sur  pour modifier un niveau existant.
- ✓ Saisir les différentes rubriques.
- ✓ Validez en cliquant sur .


L'onglet "Evaluation"

Les différentes visualisations


Les courbes d'évaluation sont affichées par niveau de difficulté (une évaluation en niveau « débutant » ne sera pas comparable avec une évaluation en niveau « confirmé »).



Visualisation de la courbe d'évaluation posturale globale. Cette courbe est la représentation de l'évolution de la surface de poussée globale réalisée par le patient.

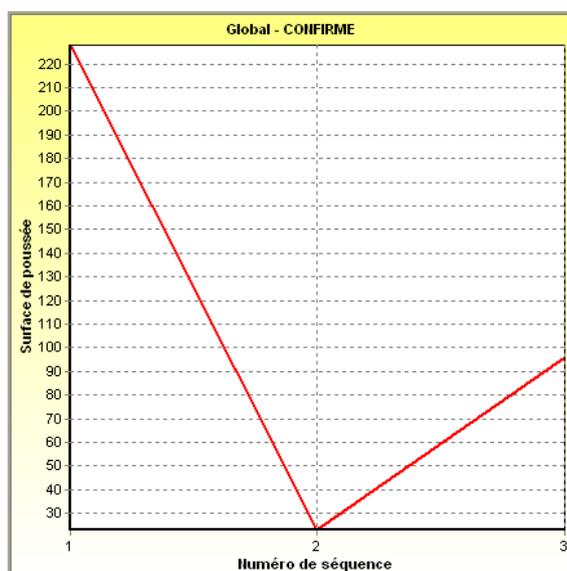

Visualisation des courbes d'évaluation posturale par cadran, ces cadrans représentant les 4 parties antérieure, postérieure, gauche et droite de l'espace.

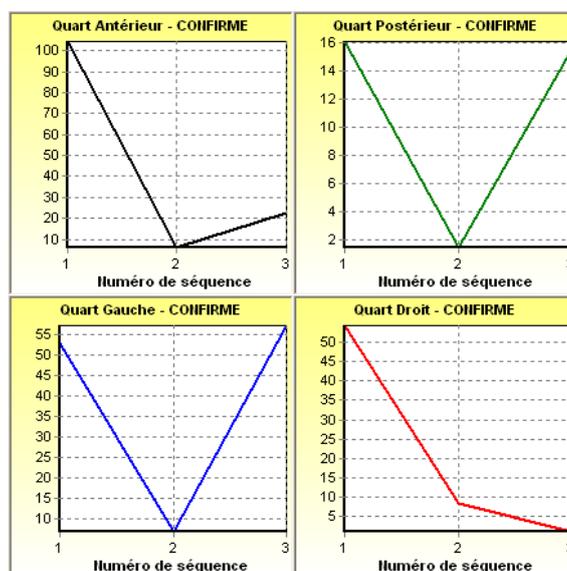


L'onglet "Evaluation"

Les différentes visualisations




Visualisation de la représentation de la surface d'évaluation. Cette option permet de visualiser les 5 dernières surfaces d'évaluation superposées. Grâce aux cases à cocher 1 sur la droite de l'écran, vous pouvez visualiser ou non chaque surface.

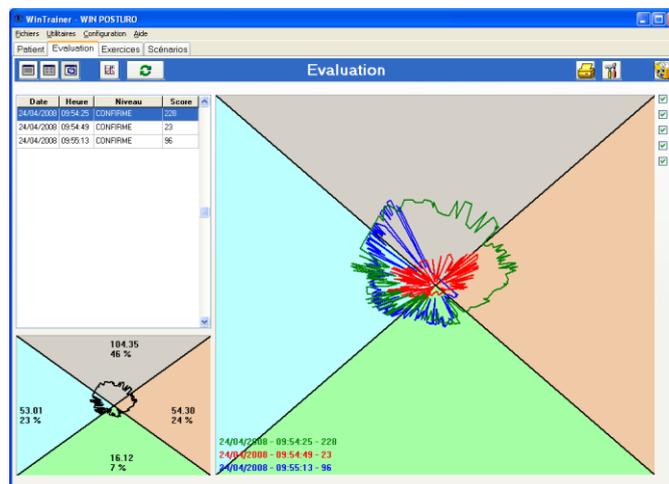

Remarque : Lorsque vous cliquez sur un exercice dans le tableau des résultats, la surface associée est affichée en bas à gauche de l'écran.

L'onglet "Exercices"

L'onglet "**Exercices**" permet l'accès au portail principal des exercices proposés par WinTrainer Nv. Il s'articule autour de 6 exercices différents entièrement paramétrables. L'évolution de la performance posturale du patient est immédiatement identifiable par la courbe d'évolution.

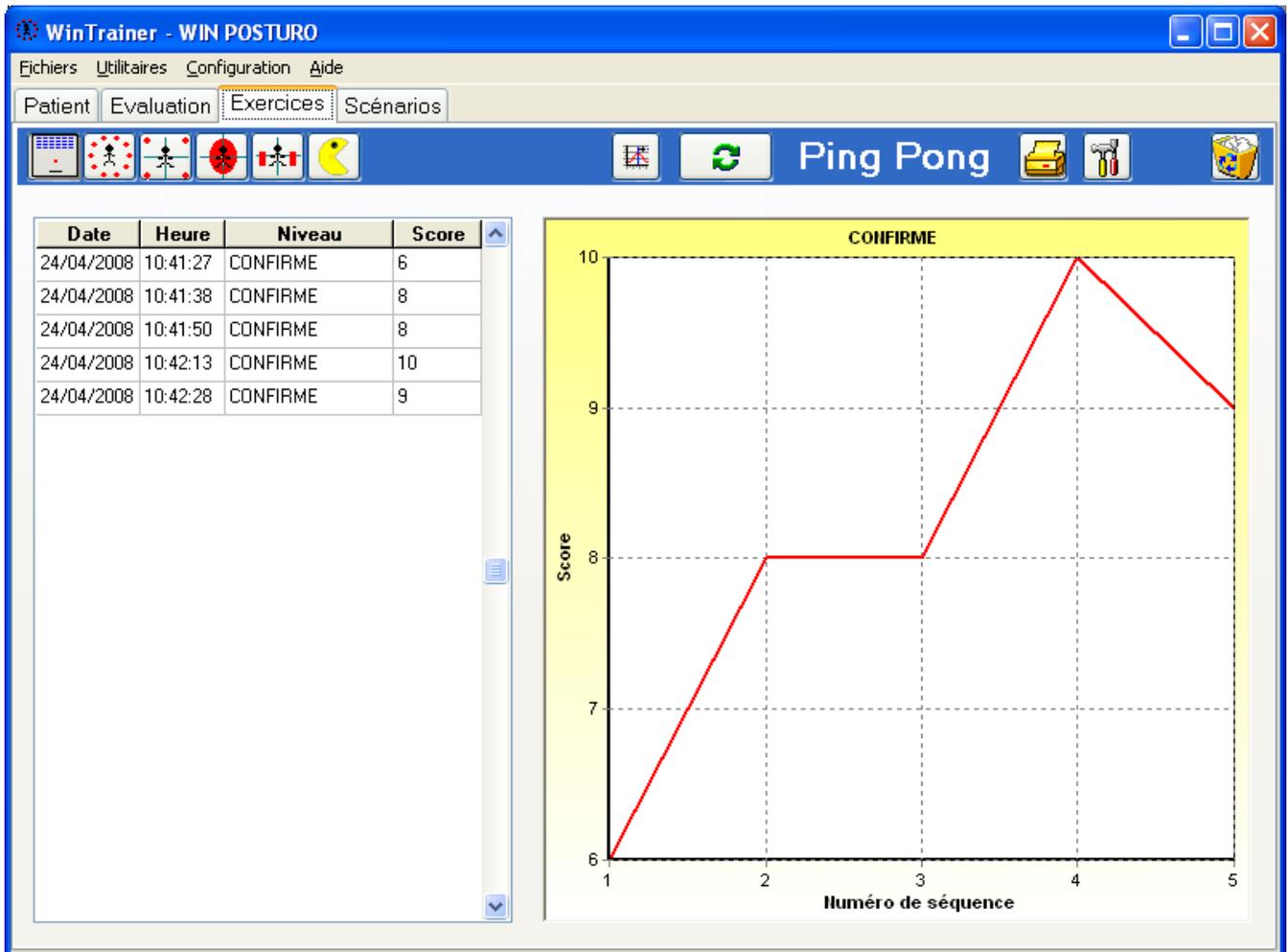

L'onglet "Exercices"

La barre d'outils

-  Sélection de l'exercice « Ping-Pong »
-  Sélection de l'exercice « Poursuite de balles »
-  Sélection de l'exercice « Apparition de balles »
-  Sélection de l'exercice « Stabilisation »
-  Sélection de l'exercice « Initiation à la marche »
-  Sélection de l'exercice « Pac-Man »
-  Accès au paramétrage des niveaux de difficulté.
-  Lancement de l'exercice.
-  Impression.
-  Calibration de la plate-forme.
-  Suppression de l'exercice sélectionné.

Création d'une mesure (Acquisition)

- ✓ Sélectionnez un exercice en cliquant sur le bouton correspondant.
- ✓ Placez le patient sur la plate-forme (voir le Manuel d'installation).
- ✓ Cliquez sur  pour lancer l'exercice.
- ✓ Pour chaque exercice vous pourrez ensuite :
 - Sélectionner le **niveau** de l'exercice.
 - **Lancer** l'exercice.
 - Faire une **Pause**.
 - **Stopper** l'exercice et ne rien enregistrer.
 - **Quitter** l'exercice.

Toutes les performances du patient sont automatiquement sauvegardées sous son nom et la date/heure de l'exercice.


Attention : si vous utilisez le plateau dynamique, cliquez sur  pour recalibrer le logiciel avec ou sans le plateau avant chaque nouvelle acquisition.

L'onglet "Exercices"

Ping Pong

Le Ping-Pong est un exercice qui détecte facilement les dysfonctionnements posturaux en isolant le déplacement latéro-latéral ou antéro-postérieur.


Le système issu du jeu « casse-brique » est très simple d'utilisation : le patient doit exécuter un maximum de points en visant et touchant les briques au moyen d'une balle et d'une raquette que vous déplacerez par vos mouvements sur la plate-forme.

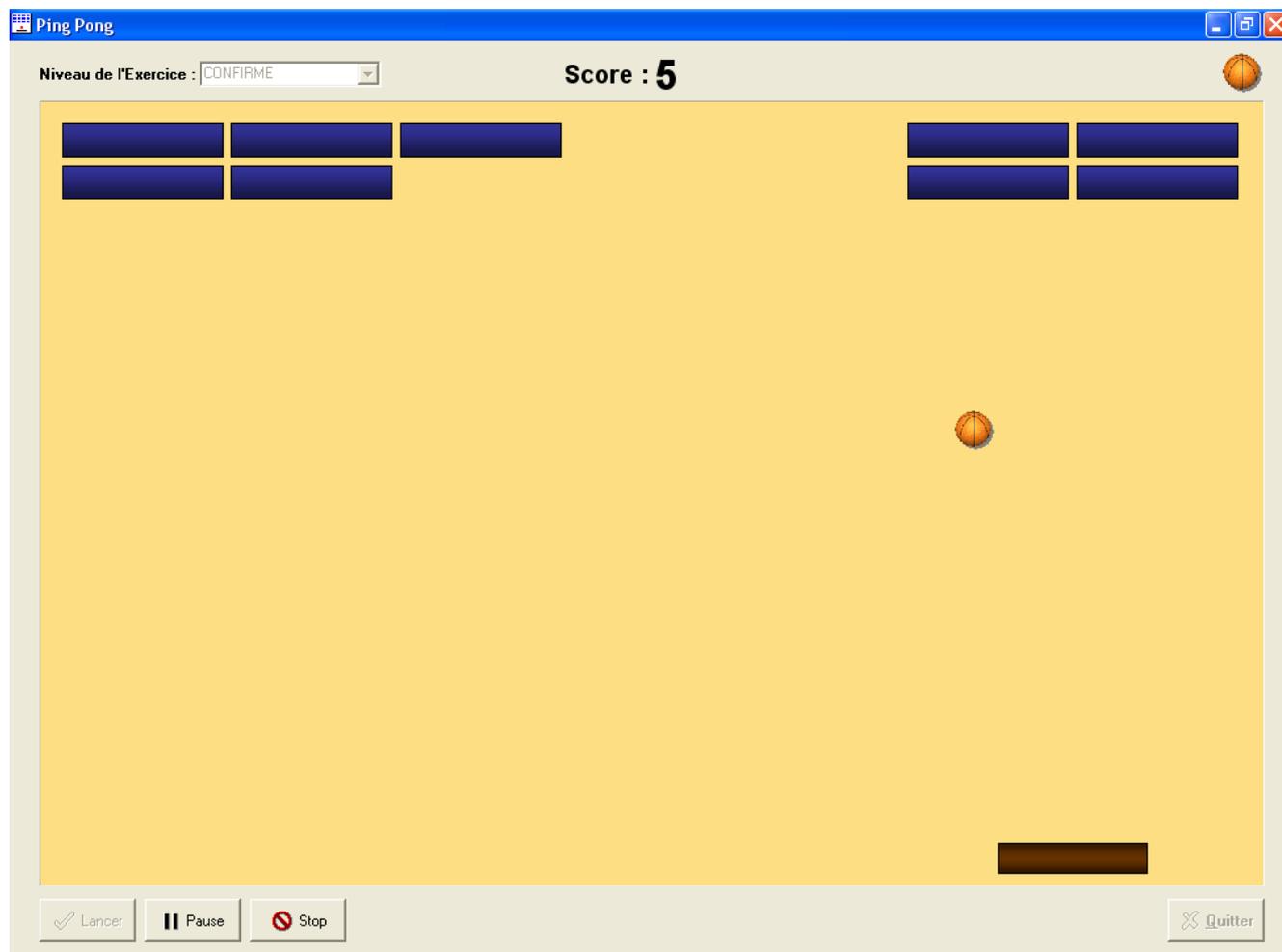

L'onglet "Exercices"

Ping Pong

Si les niveaux existants vous paraissent incomplets, vous pouvez en créer par vous-même en cliquant sur .

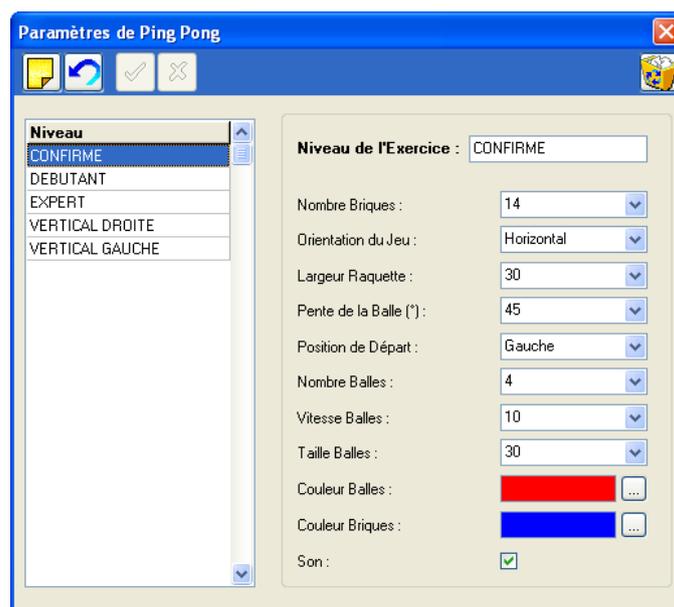

Vous pourrez alors modifier :

- Le **nombre** de briques
- L'**orientation** du jeu
- La **largeur** de la raquette
- La **pente** de la balle
- La **position** de départ
- Le **nombre** de balles
- La **vitesse** de la balle
- La **taille** de la balle
- La **couleur** des balles et des briques.

L'onglet "Exercices"


Poursuite de balles

Avec les résultats du mode évaluation, vous pouvez travailler précisément sur les carences posturales.

Cet exercice consiste à toucher les balles dans l'ordre chronologique, avec ou sans l'obligation de revenir entre chaque balle dans la position de référence.

Comme tous les exercices de WinTrainer Nv, la poursuite de balles est entièrement paramétrable pour prendre en compte la pathologie du patient et travailler sur ses faiblesses posturales.

Le score correspond au temps nécessaire pour toucher toutes les balles.

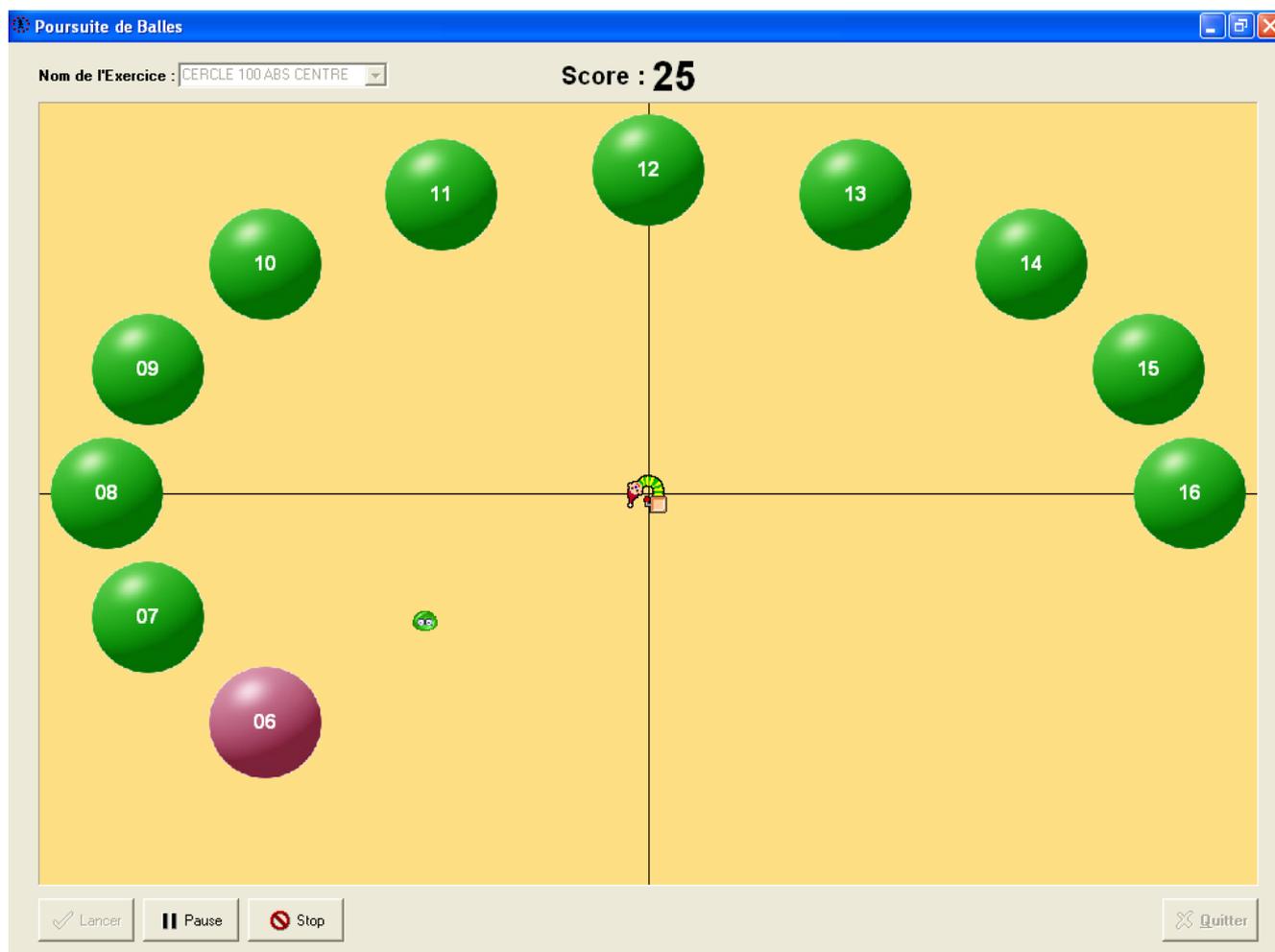

L'onglet "Exercices"

Poursuite de balles

En cliquant sur , vous pouvez modifier :

- Le type de **mouvement** :
 - ✓ *Absolu* : le mouvement que vous créez à partir de la plate-forme est exactement le même que celui visualisé à l'écran.
 - ✓ *Différentiel* : vous donnez la direction au curseur par une impulsion « posturale ». Le curseur changera de direction seulement si vous redonnez une autre impulsion.
 - ✓ *Absolu & traîne* : même mouvement que l'absolu avec une traîne derrière le curseur.
 - ✓ *Différentiel & traîne* : même mouvement que le différentiel mais avec une traîne derrière le curseur.

Dans le cas où vous choisissez différentiel, n'oubliez pas de paramétrer la vitesse.
- Les repères visuels :
 - ✓ Ajouter la **mire** ou non
 - ✓ Afficher les **diagonales** dans le référentiel
- Le **son**
- Le retour ou non dans la position de référence (revenir au centre) en cochant la case « **centré** »
- Afficher les numéros de balles aléatoirement (cocher « **aléatoire** »)
- La **vitesse** de la balle
- Le **type** prédéfini de surface de travail postural
- La **distance** des balles par rapport au centre
- La **taille** des balles
- Le **nombre** de balles
- La **taille** du personnage ou curseur
- Les **personnages** (vous pouvez appeler d'autres illustrations)
- Les **couleurs** (des chiffres, des balles et de la cible).


L'onglet "Exercices"

Apparition de balles

Cet exercice possède le même principe de fonctionnement que la poursuite de balles sauf que le patient ne peut anticiper le mouvement à réaliser car les balles apparaissent les unes après les autres.

Cet exercice améliore la réactivité du patient dans son équilibre postural.

Le score correspond au temps nécessaire pour toucher toutes les balles.

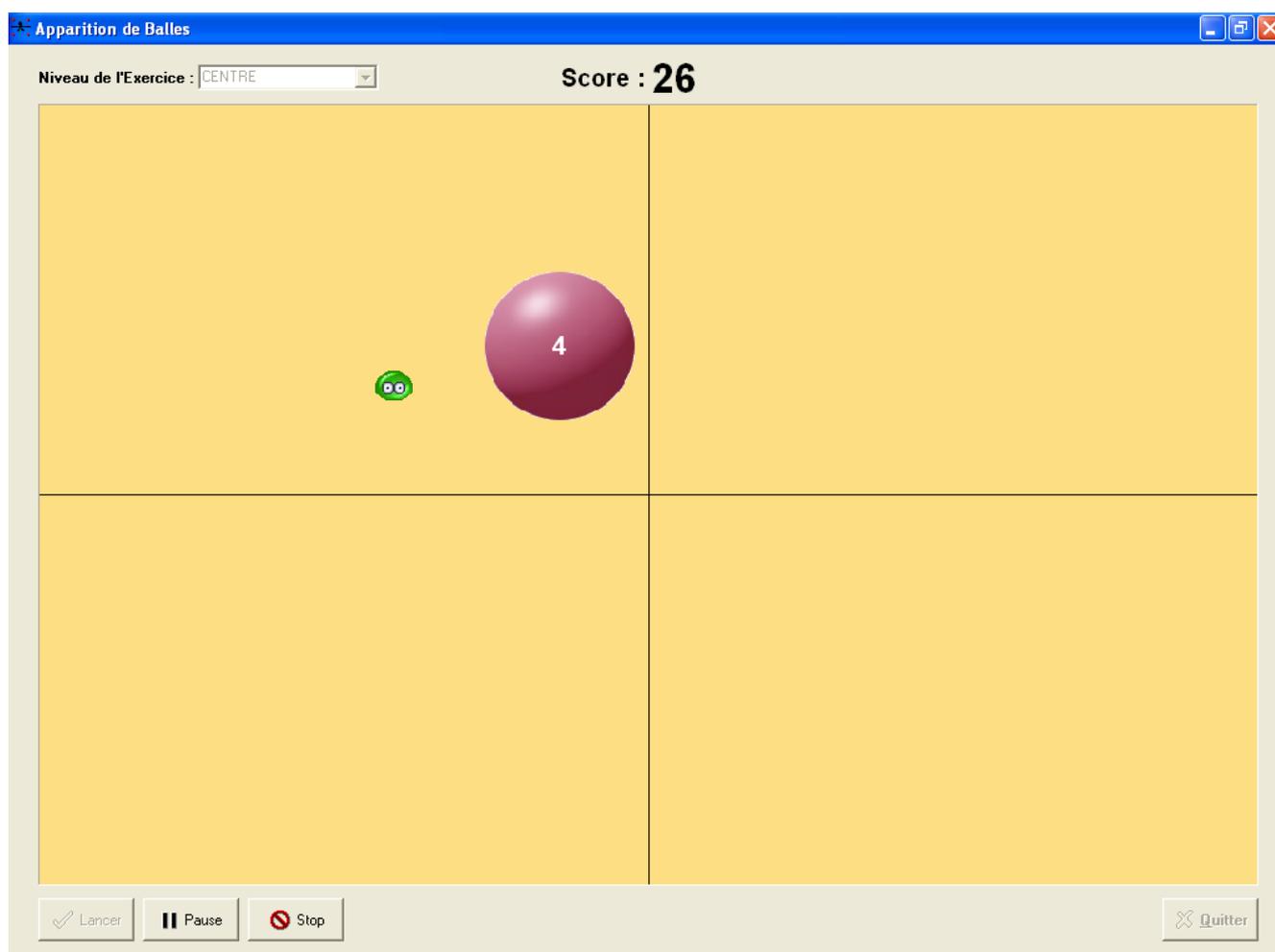


L'onglet "Exercices"

Apparition de balles

Les paramètres modifiables sont sensiblement les mêmes que sur l'exercice « Poursuite de balles » (voir page 26).

La seule différence est dans le choix d'apparition des balles. Pour ce faire, vous bénéficiez d'un écran découpé en 64 cases. Vous pouvez afficher jusqu'à 18 balles en cliquant sur les cases de cet écran.

L'ordre d'apparition des balles sera réalisé en fonction de l'ordre des numéros.

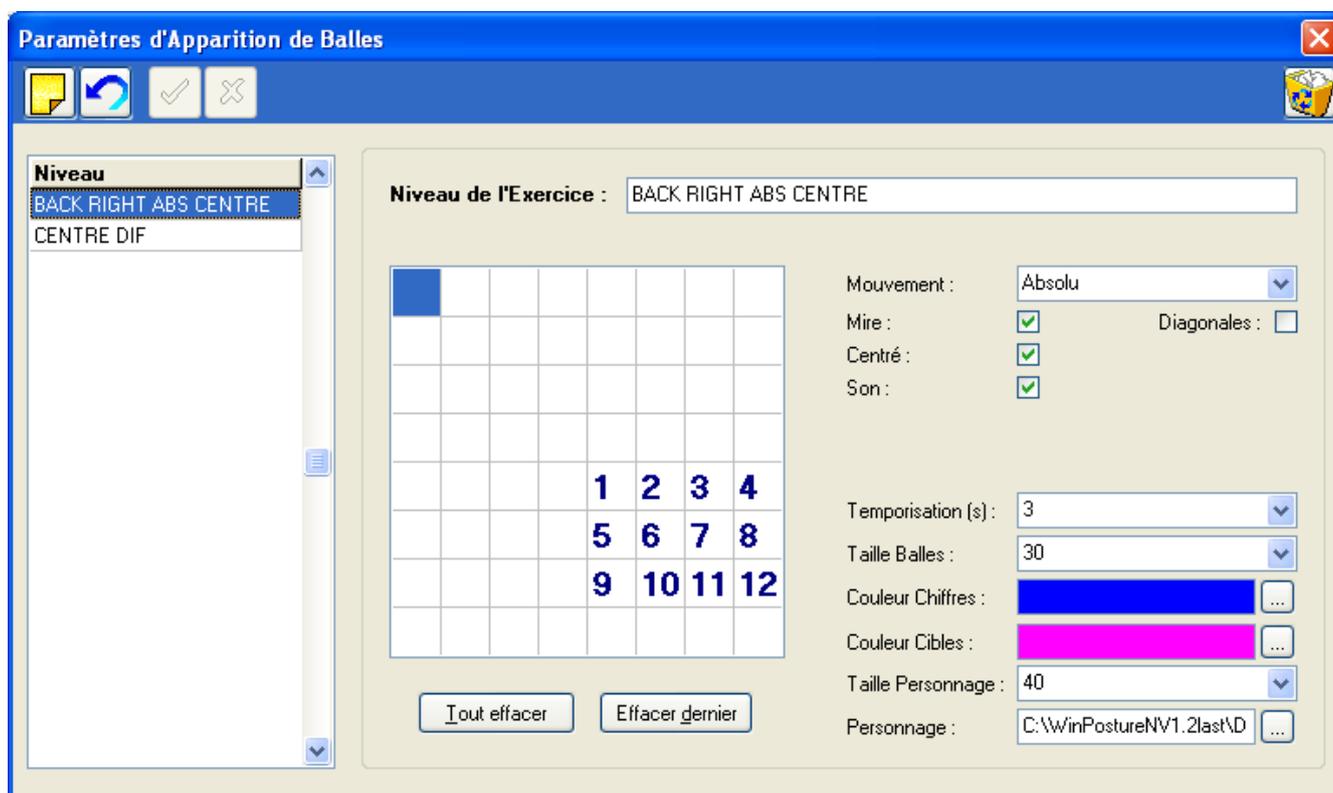


L'onglet "Exercices"

Stabilisation

Cet exercice de biofeedback visuo-postural permet de détecter et d'améliorer les troubles de stabilisation posturale.

Pour ce faire, le patient doit stabiliser le personnage le plus longtemps possible dans la surface (rouge sur l'écran ci-dessous).

Le score est affiché avec le temps réalisé à l'intérieur de la surface (chiffres en vert) et le temps passé à l'extérieur de la surface (en rouge).

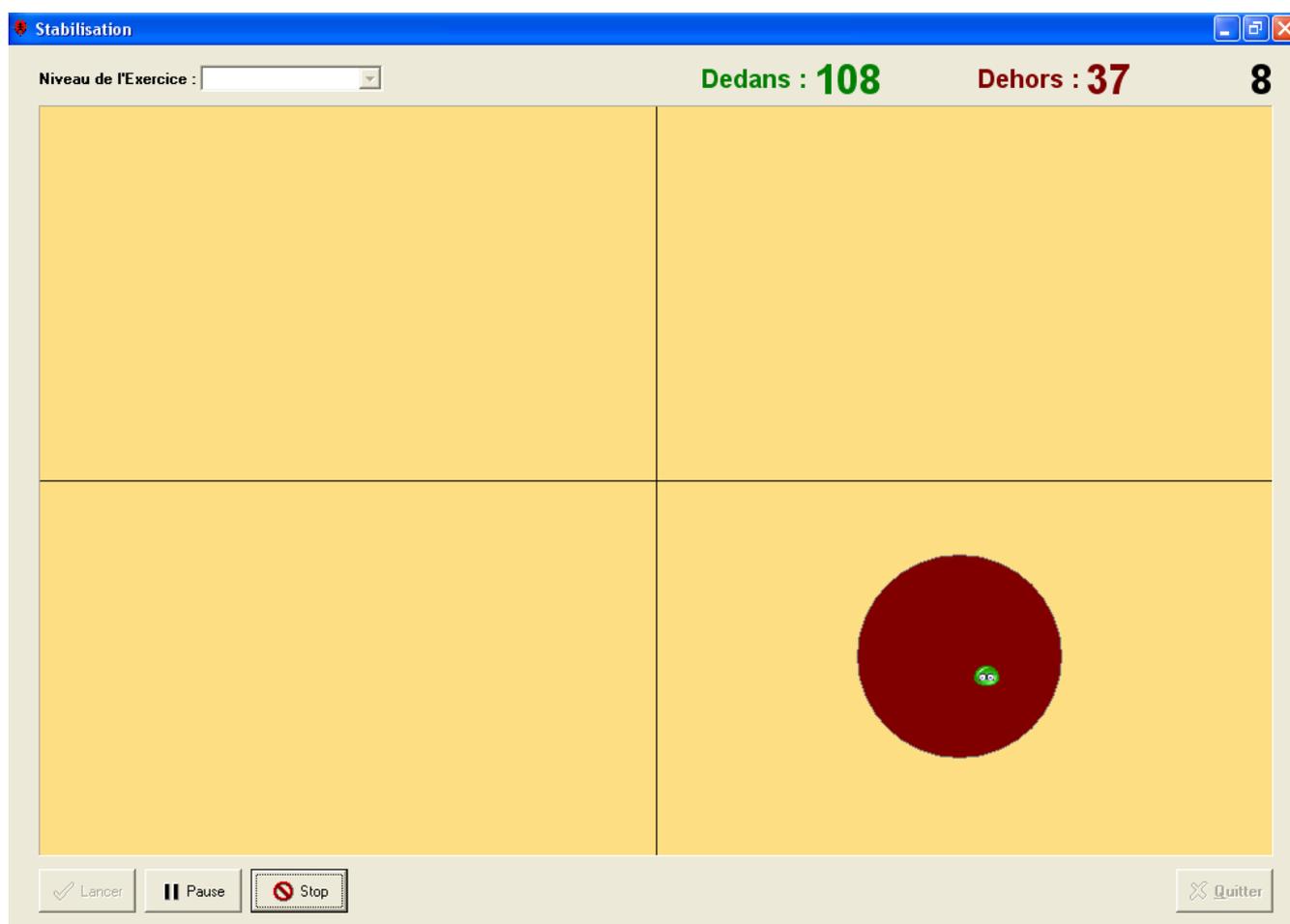


L'onglet "Exercices"

Stabilisation

En cliquant sur , vous pouvez modifier :

- Le type de **mouvement** : différentiel ou non, avec ou sans chenille (voir page 26). La chenille et la vitesse sont directement liées à cette option.
- La **durée** de l'exercice
- La **taille** du cercle
- La **couleur** du cercle
- La visualisation de la **mire**, des **diagonales**
- L'ajout de **son**
- Le **type et la taille** du personnage
- L'**emplacement** de la surface dans le rectangle (cliquez sur l'emplacement souhaité pour déplacer le cercle).

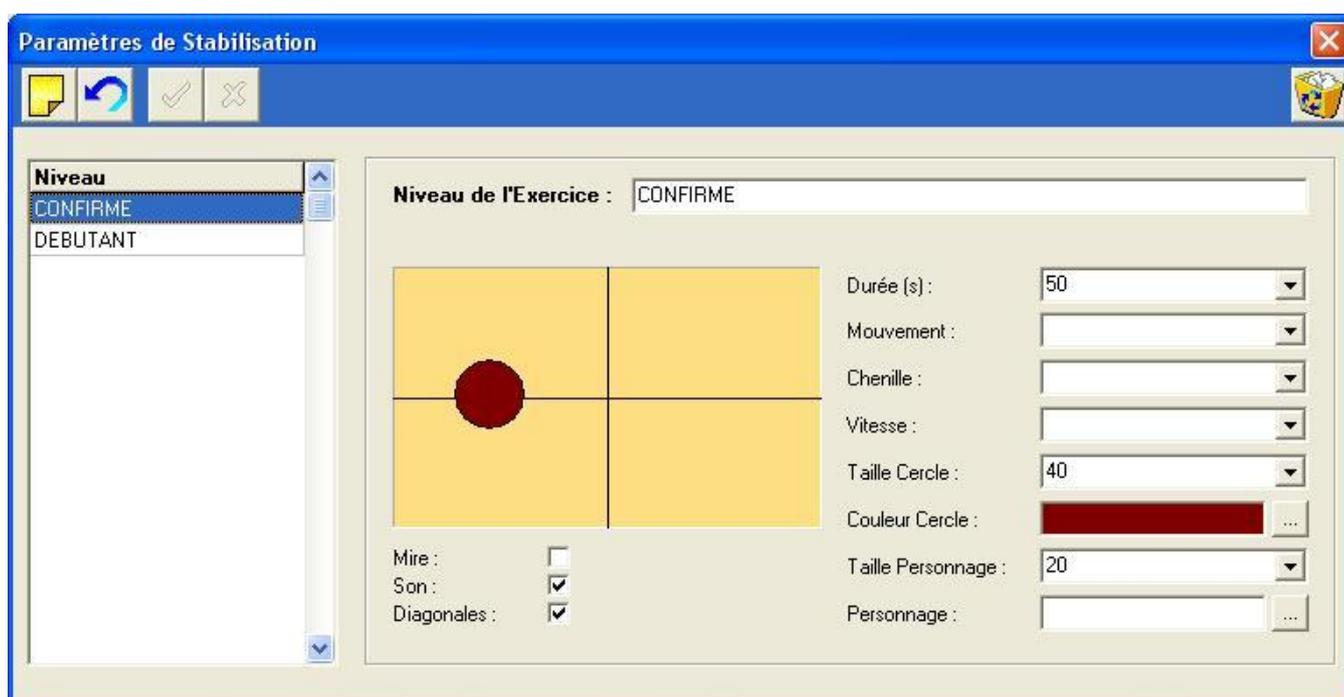

Paramètres de Stabilisation

Niveau
CONFIRME
DEBUTANT

Niveau de l'Exercice : CONFIRME

Durée (s) : 50
Mouvement :
Chenille :
Vitesse :
Taille Cercle : 40
Couleur Cercle :
Taille Personnage : 20
Personnage :

Mire :
Son :
Diagonales :


L'onglet "Exercices"

Initiation à la marche

L'initiation à la marche est un exercice dérivé de l'exercice « Stabilisation ». Celui-ci a pour particularité de travailler sur une stabilisation latéro-latérale en balançant le patient d'une surface à l'autre.

Vous pouvez complètement modifier les données de l'exercice pour adapter le niveau sur le dysfonctionnement postural du patient.

Le score est affiché avec le temps réalisé à l'intérieur de la surface (chiffres en vert) et le temps passé à l'extérieur de la surface (en rouge).

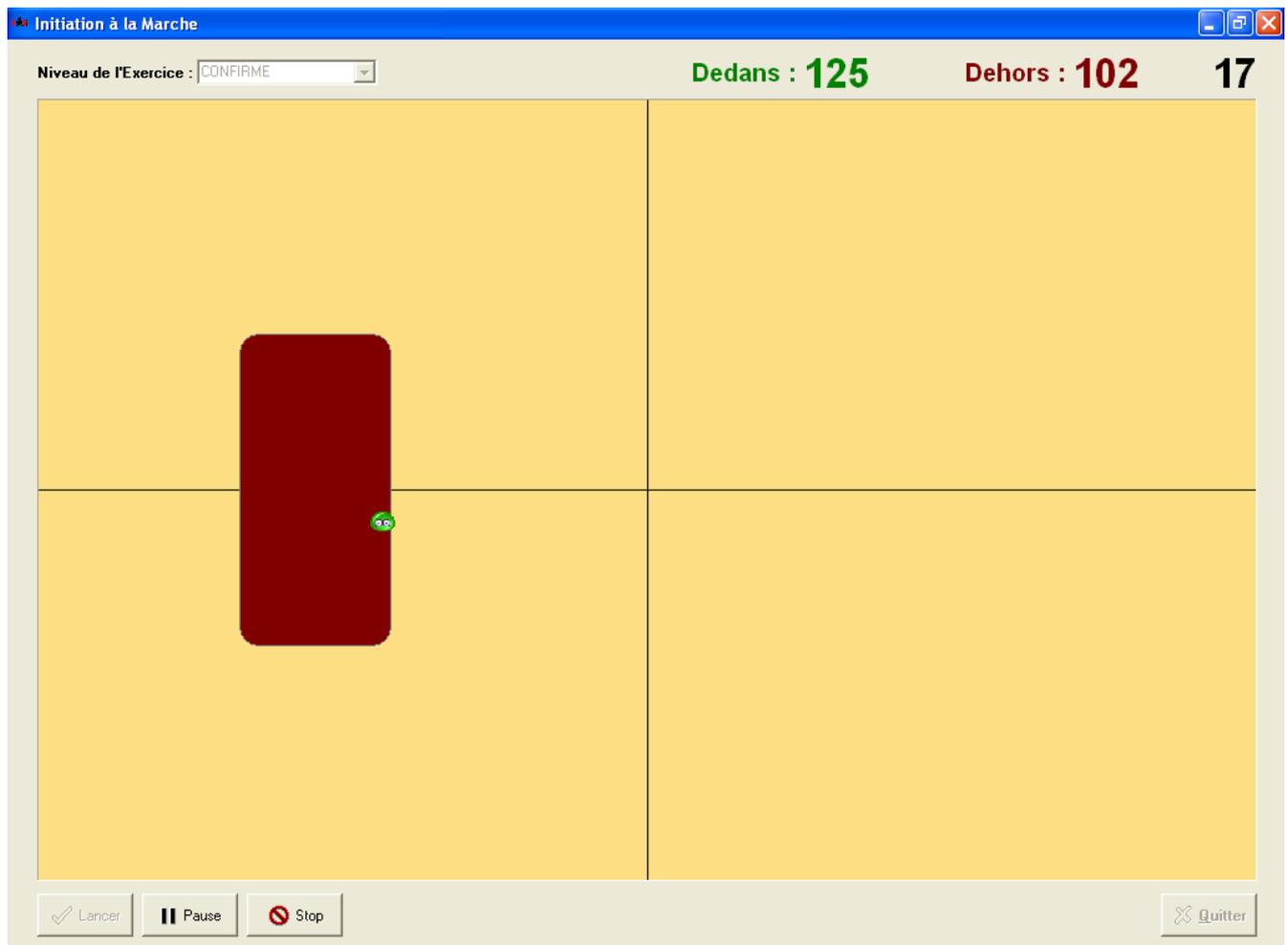

Initiation à la Marche

Niveau de l'Exercice : CONFIRME

Dedans : 125 Dehors : 102 17


Lancer Pause Stop Quitter

L'onglet "Exercices"

Initiation à la marche

En cliquant sur , vous pouvez modifier :

- La **fréquence** d'alternance rectangle gauche / rectangle droit
- Le **nombre** de rectangles qui vont s'afficher pendant la durée de l'exercice
- L'**ordre** d'affichage des rectangles (premier rectangle à gauche ou à droite)
- La **taille** du rectangle
- Le **type** et la taille du personnage
- L'ajout de **son**
- L'**écartement** des 2 rectangles en cliquant sur la mire.

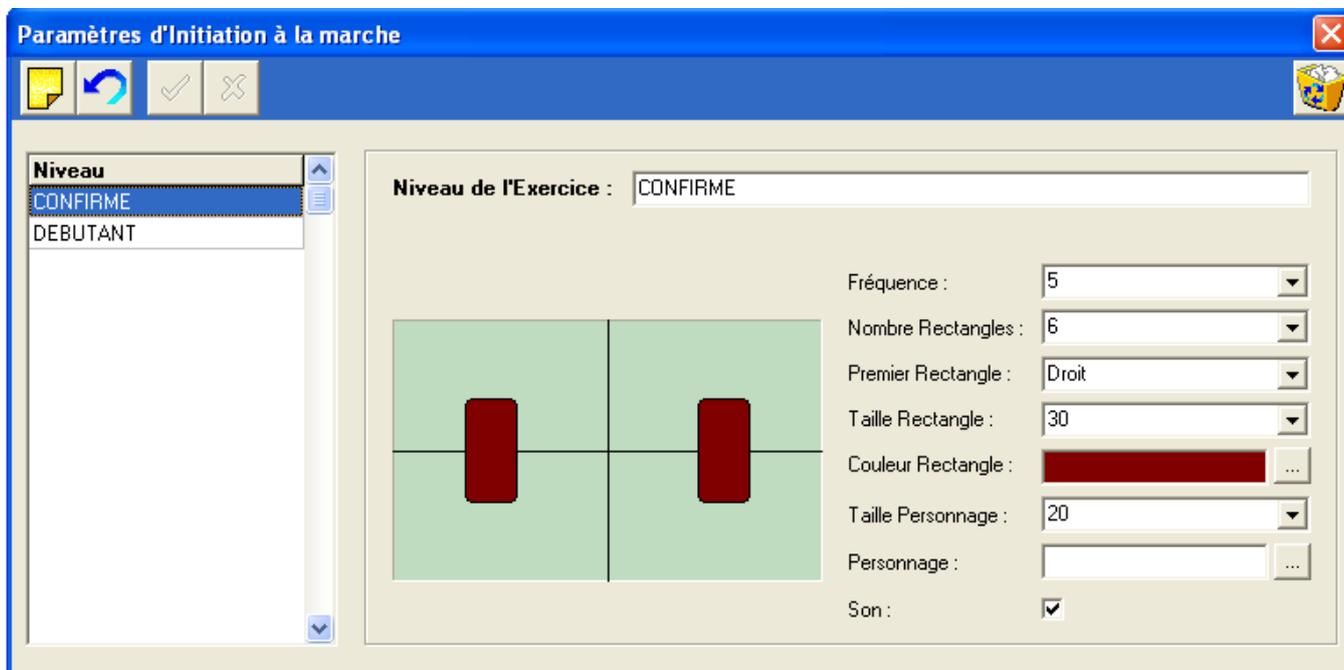


L'onglet "Exercices"

PacMan

Le Pacman est un exercice qui va travailler sur les déplacements spécifiques latéro-latérales et antéro-postérieurs.

Le but de l'exercice est de « manger » toutes les pièces ainsi que les cadenas pour récupérer un maximum de points, les pièces représentant un point et les cadenas 100 points. Dès que vous avez mangé tous les points, vous passez au tableau suivant.

Une limite de temps est imposée dans laquelle vous devez récupérer le maximum de points.

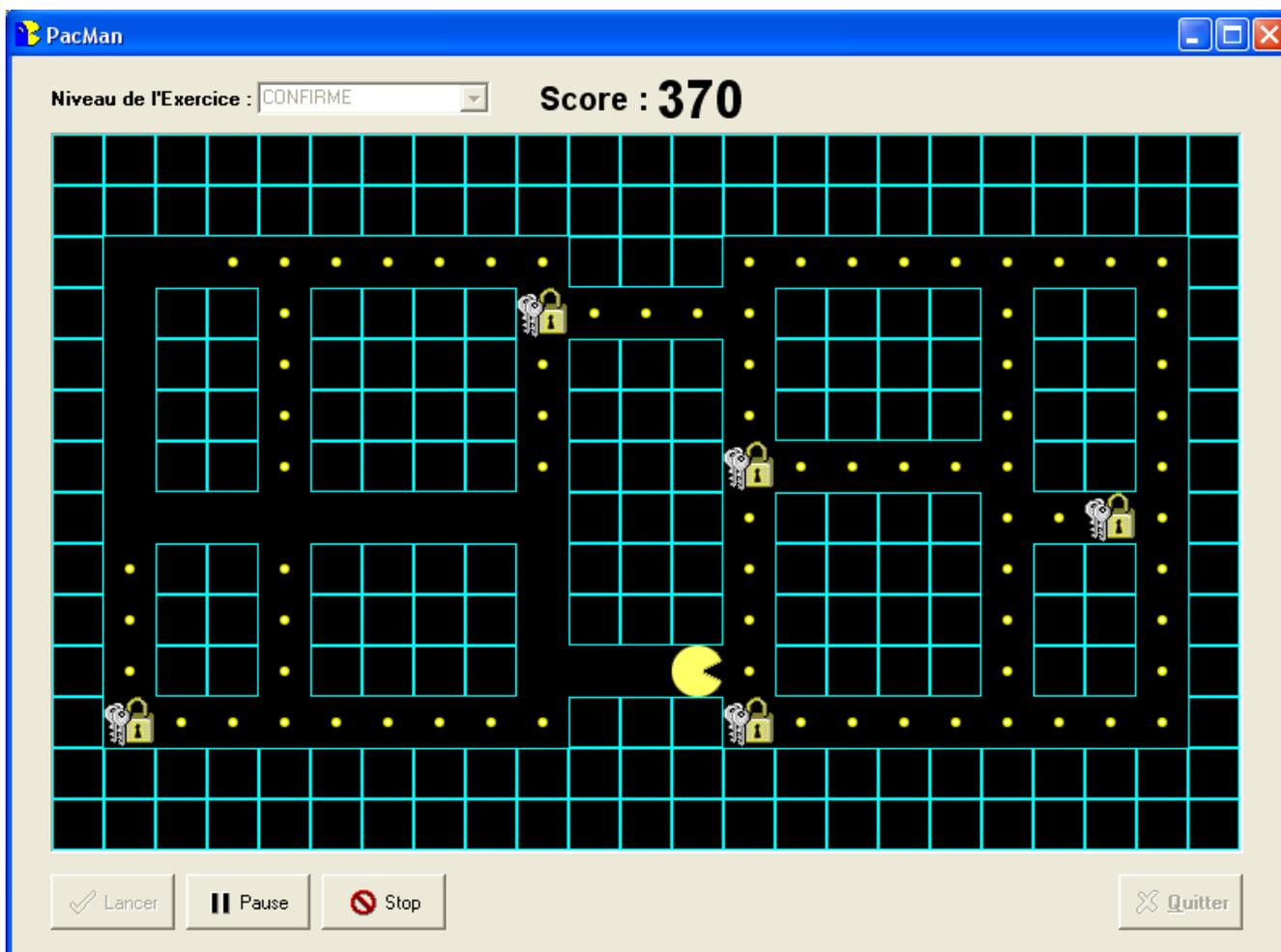


L'onglet "Exercices"

PacMan


En cliquant sur , vous pouvez modifier :

- La **durée** de l'exercice
- La **vitesse** du pacman
- L'ajout de **son**
- La **position de départ**
- La **forme** du labyrinthe :
 - ✓ Sélectionnez l'élément que vous voulez placer dans le labyrinthe (point, cadenas ou mur)
 - ✓ Cochez Symétrie Verticale ou Horizontale si nécessaire
 - ✓ Placez les éléments en cliquant sur le labyrinthe et en déplaçant la souris tout en la maintenant enfoncée.

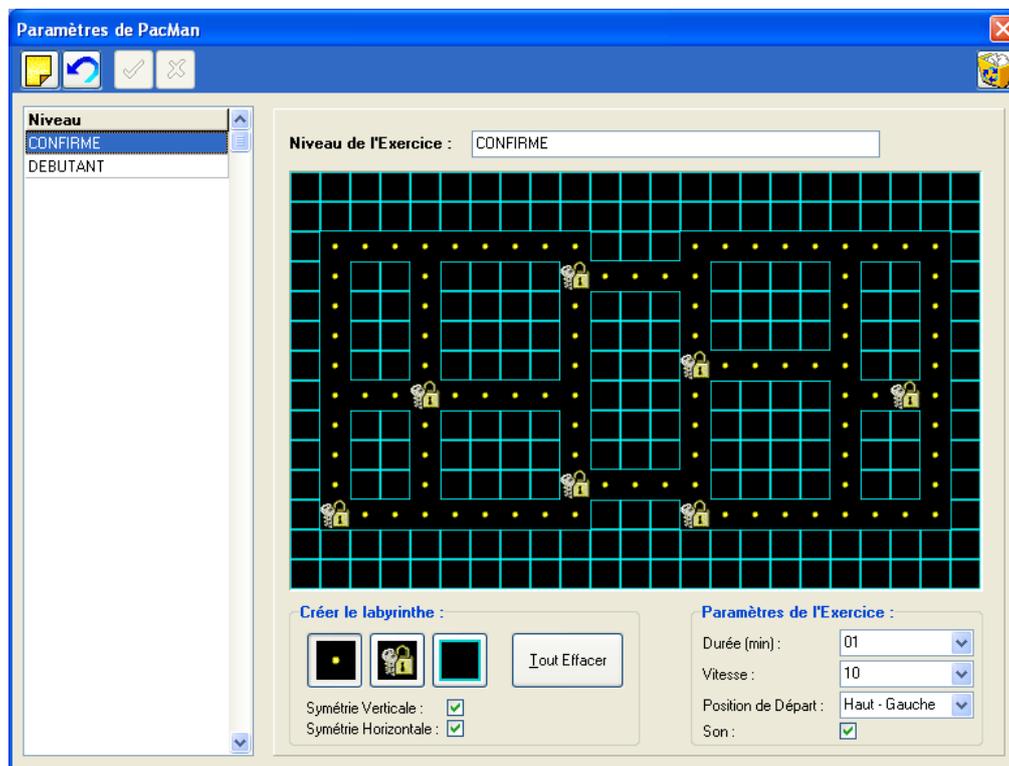

L'onglet "Scénarios"

Cet onglet permet de créer des scénarios afin d'enchaîner les exercices sans l'intervention du praticien.

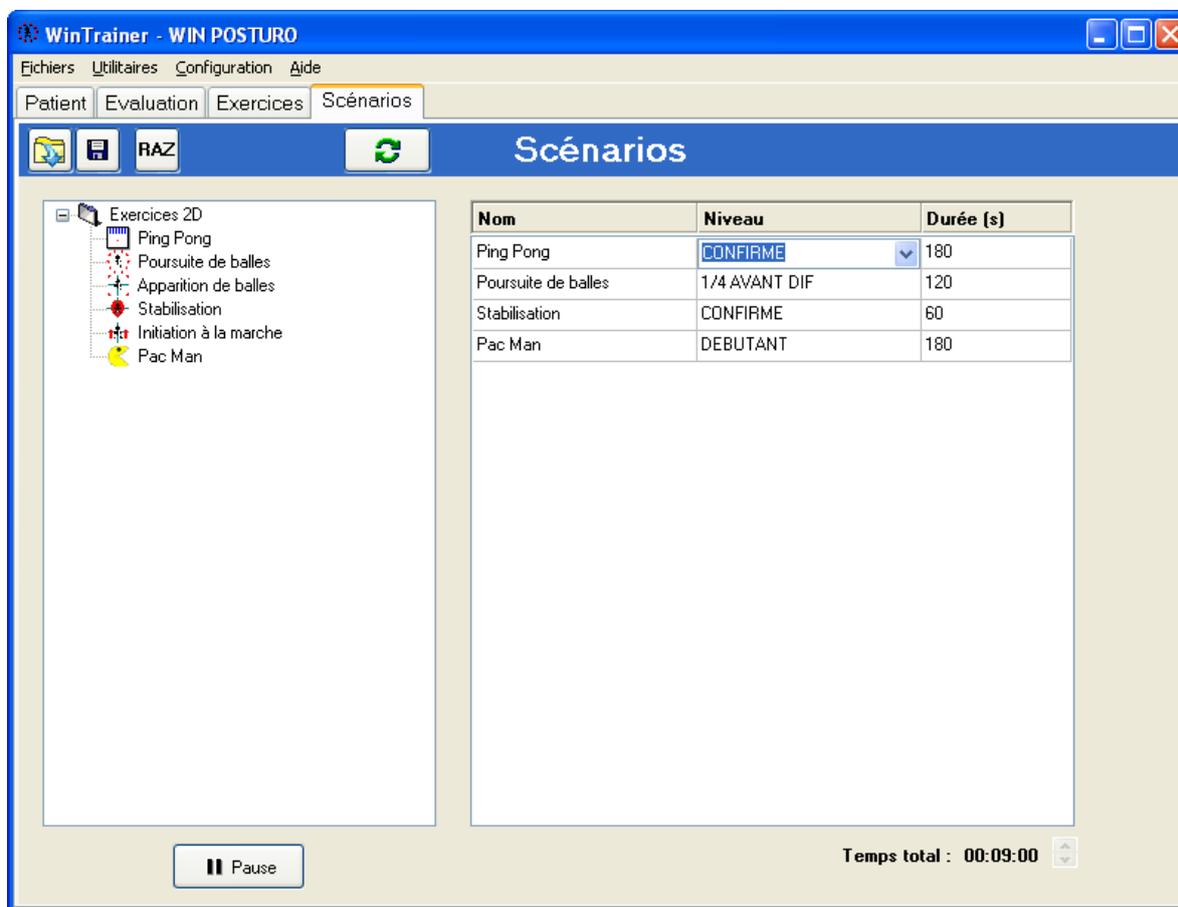

Sur la gauche de l'écran vous disposez de tous les exercices disponibles. Double-cliquez sur celui qui vous intéresse pour le placer dans un scénario puis modifier si besoin son niveau et sa durée. Pour lancer le scénario, cliquez sur .


Remarque : vous pouvez placer des pauses entre les exercices en cliquant sur  puis modifier si besoin la durée de la pause.

La barre d'outils

-  Rappeler un scénario existant.
-  Sauver le scénario en cours.
-  Effacer le scénario en cours.
-  Lancer le scénario.

Impression

Lorsque vous cliquez sur  dans le logiciel, la fenêtre suivante apparaît.

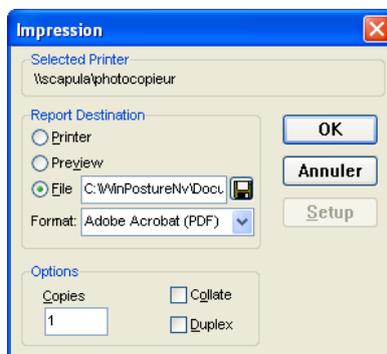

Plusieurs destinations sont alors possibles :


- **"Printer"** : pour envoyer directement l'ordre d'impression à votre imprimante.
- **"Preview"** : pour lancer l'aperçu d'impression
- **"File"** : pour enregistrer le fichier à imprimer sur le disque dur de l'ordinateur, notamment au format PDF.

Vous pouvez supprimer l'affichage de cette fenêtre et l'impression se lancera alors directement lorsque vous cliquerez sur . Allez dans le menu *Configuration / Paramètres / Générales* (voir page 11).

Exportation de données

En cliquant avec le bouton droit de la souris sur une des courbes du logiciel vous pouvez :

- **Copier dans le presse-papier** l'image sélectionnée.
- **Enregistrer dans un fichier** l'image sélectionnée au format Bitmap. Une fenêtre apparaît alors permettant de spécifier le nom et l'emplacement du fichier qui sera créé :

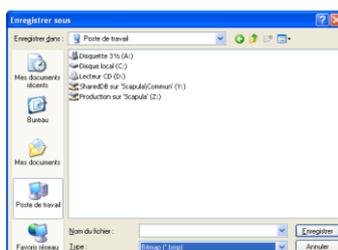

- **Exporter les séries dans Excel**. Un nouveau fichier Excel est créé, enregistrez-le sur le disque dur.

Sauvegarde du fichier patient

ATTENTION !

Il est nécessaire de sauvegarder fréquemment le fichier patient du logiciel "WINTRAINER NV" qui regroupe tous les patients. En effet, une panne technique de l'ordinateur peut abîmer, voire détruire toutes vos données qui deviennent alors irrécupérables. Une sauvegarde par semaine est conseillée.

Sauvegarder le fichier patient

Copiez le répertoire C:\WinPostureNv\DATA sur une unité de sauvegarde, soit :

- Un graveur CD ou DVD
- Un lecteur ZIP
- Un autre disque dur

Récupérer un fichier patient sauvegardé

En cas de doutes, nous consulter.

Procédure à suivre en cas d'installation sur une nouvelle configuration informatique :

- ✓ Installez le logiciel "WINTRAINER NV" suivant les instructions du manuel.
- ✓ Lancez l'utilitaire DBManager accessible depuis **Démarrer / Tous les programmes / Medicapteurs**.
- ✓ Dans l'utilitaire DBManager :
 - Cliquez sur le bouton "**Importation d'une Base**".
 - La fenêtre "Assistant pour l'importation d'une base de données" s'ouvre.
 - Sélectionnez votre unité de sauvegarde.
 - Double-cliquez sur votre ancien répertoire DATA.
 - Ensuite cliquez sur le bouton "**Suivant**" puis sur "**Commencer**".
- ✓ Une fois l'importation terminée tous vos patients sont directement intégrés dans le fichier patient du logiciel "WINTRAINER NV". Vous pouvez vérifier que l'importation s'est bien déroulée en ouvrant le logiciel "WINTRAINER NV" puis en cliquant sur le bouton "Recherche" de l'onglet "Patient". Vérifiez alors que la liste apparaît et que les mesures associées sont bien présentes.

Aux termes de l'article 40 de la loi du 11 mars 1957 "toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite".

L'article 41 de la même loi n'autorise que "les copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective" et "les analyses et courtes citations", "sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source".

Toute représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, ne respectant pas la législation en vigueur constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 à 429 du Code Pénal.

© MEDICAPTEURS - Toulouse - FRANCE - Novembre 2017



medicapteurs
PODOLOGIE, POSTUROLOGIE ET RÉÉDUCATION

« Les Espaces de Balma »
18 avenue Charles de Gaulle - Bât. 34 - 31130 BALMA
Tel :33 (0) 562 571 571
www.medicapteurs.fr

CE 0124
Copyright 2017