

## PodoCapture – Démarrage rapide

<p style="text-align: center;"> <b>Première Acquisition</b></p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Connectez-vous manuellement à la plate-forme depuis le gestionnaire de wifi du mobile en sélectionnant votre plateforme (xxxx_SVR_xxx) dans les réseaux wifi.</li><li>2) Ouvrez PodoCapture et créez un compte si vous le jugez nécessaire.</li><li>3) Créez un nouveau patient. Renseignez le poids pour afficher les calculs.</li><li>4) Choisissez le type de mesure.</li><li>5) A la première acquisition PodoCapture devra enregistrer votre plateforme. Le gestionnaire de wifi du mobile s'ouvre, vérifiez que la plateforme est bien sélectionnée et cliquez sur le bouton marche arrière du mobile  ou  pour retourner sur PodoCapture. Le logiciel sélectionnera automatiquement ce réseau pour les prochaines acquisitions.</li><li>6)  Permet de modifier les paramètres d'acquisition en dynamique et posturologie.</li><li>7) Cliquez sur le bouton  pour faire l'acquisition.</li></ol>
<p style="text-align: center;"> <b>Bouton d'acquisition inactif</b></p> <p>Ecran Configurations, accessible depuis l'écran Patients avec le bouton  :</p> 	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ La plateforme n'est pas allumée.</li><li>➤ Le wifi sélectionné (étape 1 ci-dessus) n'est pas celui de la plateforme. Ce réglage peut être réinitialisé dans l'écran configuration avec le bouton « Supprimer la sélection de la plateforme ».</li><li>➤ La plateforme est déjà connectée à un autre appareil (le PC par ex.) et donc ne peut se connecter au mobile. Une lumière centrale sur le capot de la plateforme allumée et fixe indique une connexion wifi établie.</li><li>➤ Le mobile a basculé sur un autre réseau wifi.</li><li>➤ Si le bon réseau wifi est sélectionné revenir sur l'écran patient et réalisez une nouvelle acquisition.</li><li>➤ Redémarrez la plateforme.</li><li>➤ Coupez le wifi du mobile et laissez PodoCapture le reconnecter.</li><li>➤ Si vous n'avez jamais pu faire d'acquisition et que tous les points précédents ont été vérifiés, veuillez modifier la configuration de PodoCapture par le bouton « Config 1 » et retentez une acquisition. Procédez de même avec « Config 2 » si nécessaire.</li></ul>